


1



Otevřete vnější obal v souladu se zásadami aseptiky a soupravu položte na instrumentační stůl. Na stole rozložte vnější roušku a položte na ni ostatní prvky.

2

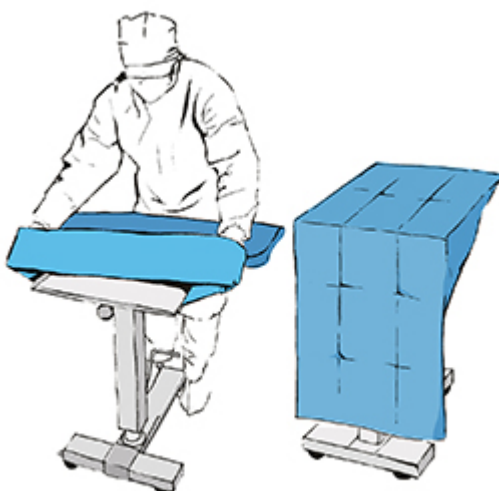

Natáhněte návlek na instrumentační stolek.

3




Před zakrytím pacienta (vymezením chirurgického pole) věnujte pozornost piktogramům s vyznačením směru, ve kterém má být rouška rozložena.

4




5

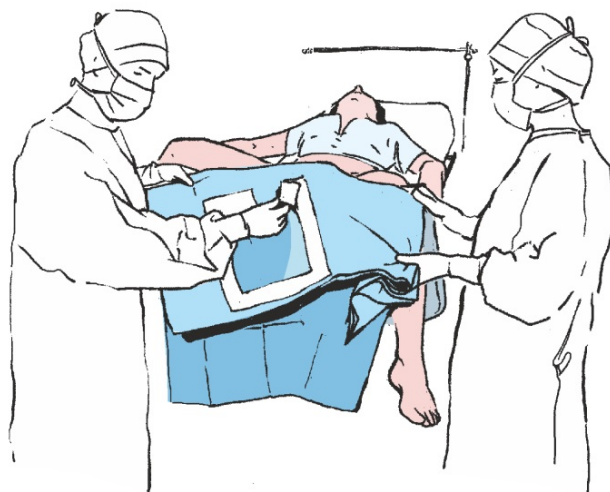

Rozložte okraje roušky do strany. Odstraňte uvolňovací papír z okna hlavní roušky.

6

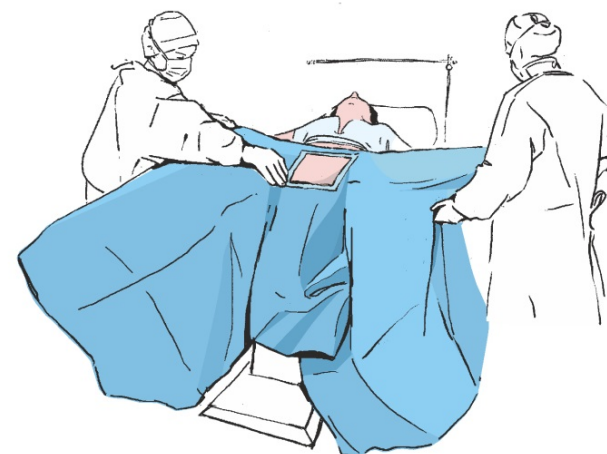


Přetáhněte přes nohy pacienta a přilepte roušku k břichu pacienta, vymezte tak hranici operačního pole. Poté přitlačte místo na roušce, kde je nanášeno lepidlo, k tělu pacienta, aby se zvýšila přilnavost k jeho pokožce.

7



Rozložte strany roušky tak, aby volně visely z operačního stolu. Rozložte horní část roušky směrem k hlavě pacienta (směrem ke stojanu pro anestezii). Roušku umístěte přes rám a vytvořte tak anestetický prostor.

8

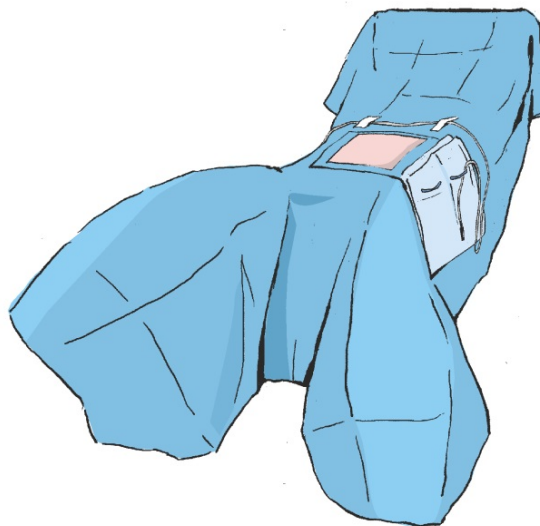

Nakonec připevněte fóliový sáček k roušce.