

Krytí je určeno k ochraně zdravotnického vybavení během chirurgických zákroků. Je univerzální a lze ho použít na všechny druhy kamer a endoskopů. Zajišťuje kompletní a sterilní bariéru, chrání vybavení operačního sálu před možnou kontaminací. Zároveň chrání před poškozením a znečištěním přístrojů. Pružnost a měkkost materiálu usnadňuje manipulaci se zakrytými přístroji během operace.

1



Rozbalte papírovo-fóliový obal odtržením papírové vrstvy od fóliové (v místě svaru ve tvaru V) a vyjměte fóliové krytí na zařízení.

2




Po vyjmutí fóliového krytí z obalu, lehce zatáhněte za fóliový rukáv s barevnou páskou.

3



Protáhněte optiku zařízení skrz užší konec fóliového krytí a zajistěte barevnou páskou.

4

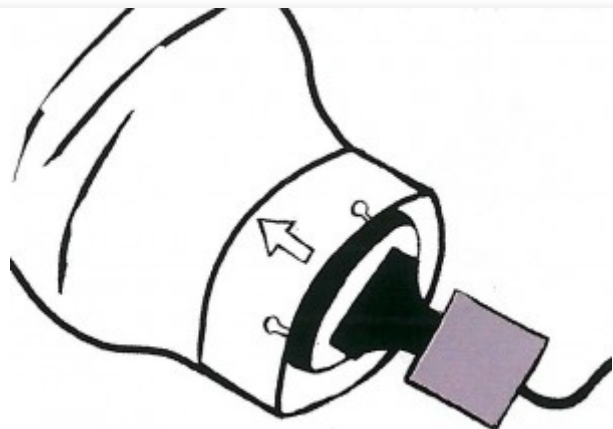


Po směru šipky protáhněte kameru druhým koncem rukávu s papírovým lemem.

5




Připojte optiku s kamerou uvnitř fóliového rukávu.

6

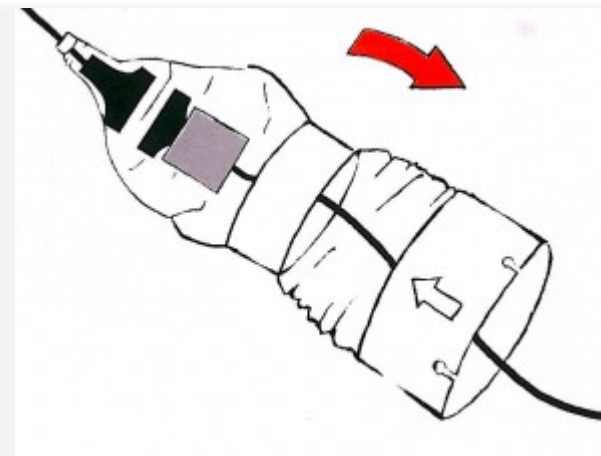


Roztáhněte fóliové krytí po celé délce kabelu.

7

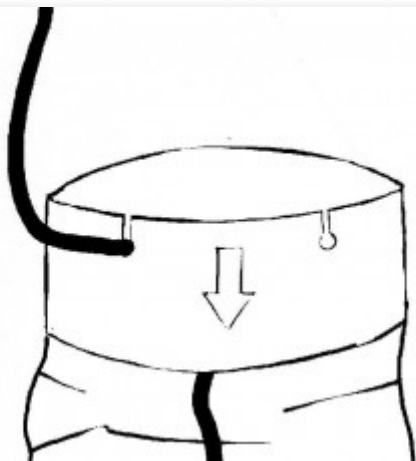

Kabel zajistěte jeho provlečením do vyznačených otvorů v papírovém lemu.

8

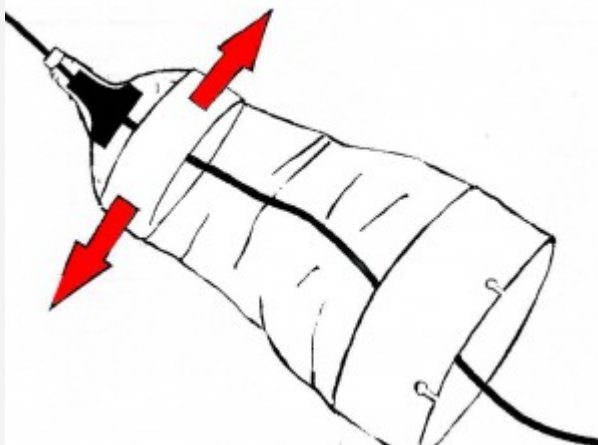

Po roztažení fóliového krytí můžete odstranit vnitřní kroužek (odtržením lepicí pásky). Informace ke stažení PDF.