

Codosil ADHESIVE je měkký silikonový obvaz používaný ke snížení velikosti hypertrofických a keloidních jizev ke zlepšení jejich barvy a pružnosti, takže jsou méně patrné.

1



Vyjměte obvaz z obalu a nůžkami jej upravte podle tvaru jizvy. Obvaz by měl být na okrajích asi o 1 cm širší než velikost jizvy. Není nutné okamžitě spotřebovat celý obvaz, např. pokud ošetřujeme mnohem menší jizvu. Může být použit kus po kousku.

2



Sloupněte bílý ochranný film, který chrání přilnavou vrstvu obvazu.

3



Nalepte obvaz na povrch jizvy. Adhezivní vlastnosti obvazu umožňují jeho opakované lepení na povrch kůže. Před každým dalším použitím je nutné obvaz vyprat.

4



Aby se zabránilo náhodnému odstranění obvazu z pohyblivých částí těla, doporučuje se použít elastickou obvazovou síťku Codofix®. Síťka je k dispozici v 8 různých šířkách, což umožňuje přesný výběr produktu pro danou část těla.