


Náplast Fixopore F má výjimečně jednoduchý a intuitivní systém aplikace (průstřih ve tvaru vlnovky). Při jeho aplikaci slouží jako pomůcka papírky s natištěnými čísly, která uvádějí pořadí provádění jednotlivých úkonů.

1

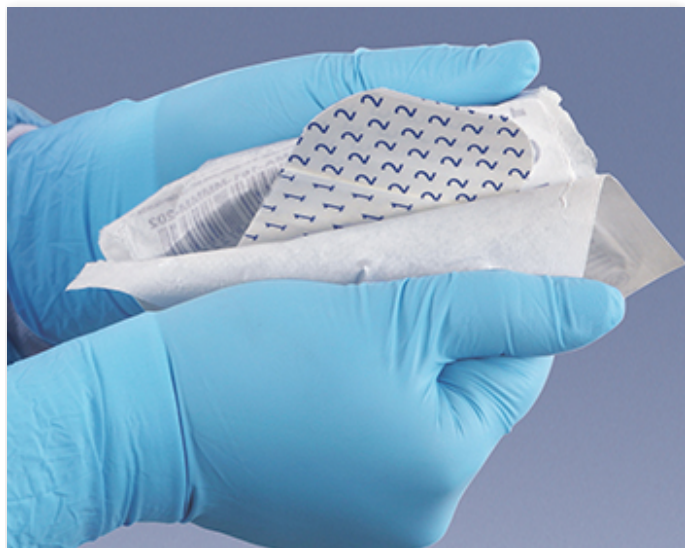

Před aplikací náplasti je třeba očistit ránu a osušit pokožku v jejím okolí.

2



Jednotlivý obal otevřeme bez trhání papíru a náplast vyjmem.

3



Odstraníme ochranný papírek označený vespod číslem 1.

4



Přiložíme náplast na ránu.

5




Odstraníme ochranný papírek označený číslem 2.

6



Přilepíme celou náplast k pokožce jejím přitlačením k tělu.

7

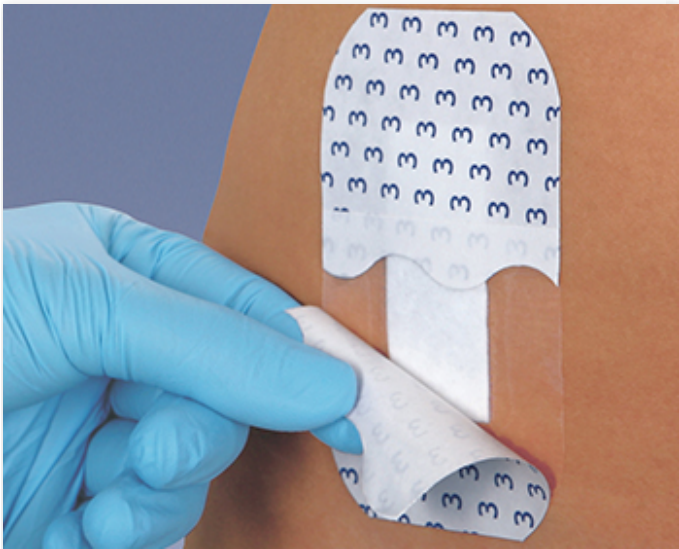


Odstraníme ochranný papír označený číslem 3 - uchopíme jej za okraje u průstříhu ve tvaru vlnovky a roztáhneme do stran.

8



9

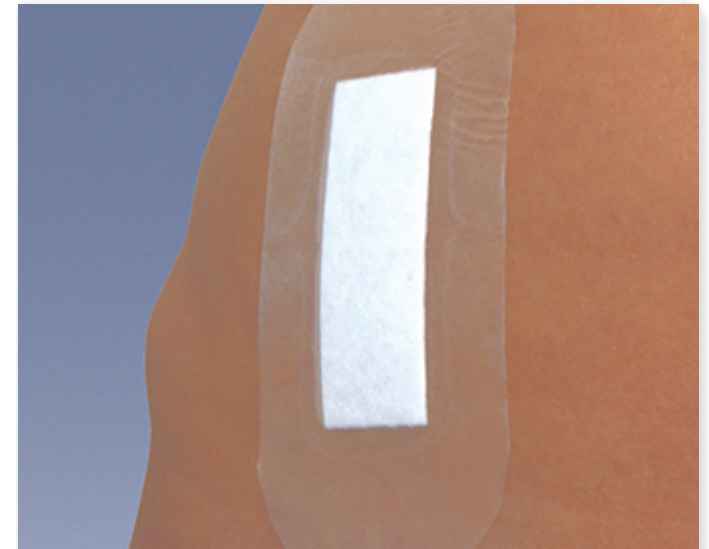

Vyhladíme povrch náplasti přitlačením okrajů k pokožce.

10



Při aplikaci náplast nenapínejte.

11



Při aplikaci se nedotýkejte absorpčního polštářku.

12




Četnost převazů je dána mírou exsudace z rány.

13



Průhledná struktura svrchní části náplasti umožňuje stálé sledování pokožky v okolí rány.

14

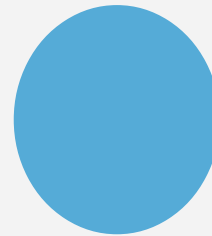

Pro bezbolestné odstranění náplasti je třeba odlepit jeden roh a následně jeho roztahováním směrem dolů porušit strukturu lepidla, což umožní snadné a bezbolestné uvolnění náplasti z pokožky a rány.