

Příklad sady pro dialýzu MA-991-ZEST-487.

1




Před zahájením procedury si umyjte ruce (odborník a pacient).

2



K provedení procedury si připravte desinfekční prostředek, zaškrcovadlo, vhodné kanyly pro začátek i konec procedury.

3

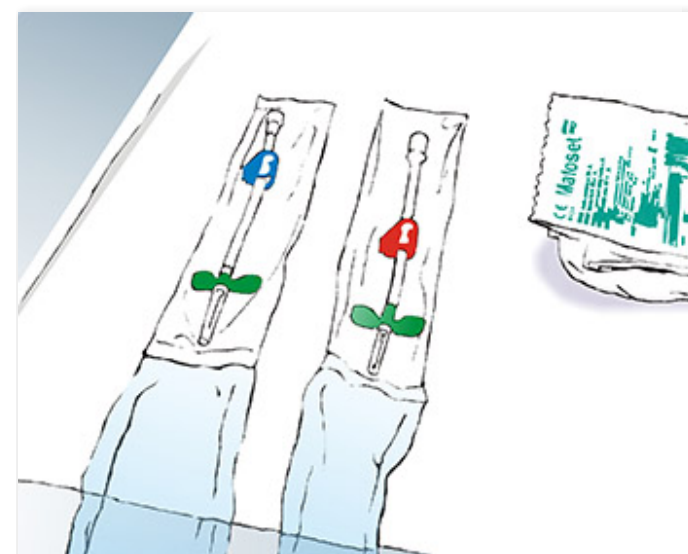

Vyjměte sterilní roušku a umístěte ji pod předloktí pacienta.

4



5



Poté si dejte jednu rukavici na levou ruku a druhou na sterilní část otevřeného obalu.

6



7




Dezinfikujte předloktí pacienta pomocí připravené dezinfekční kapaliny a sterilních tamponů ze soupravy.

8




»

9

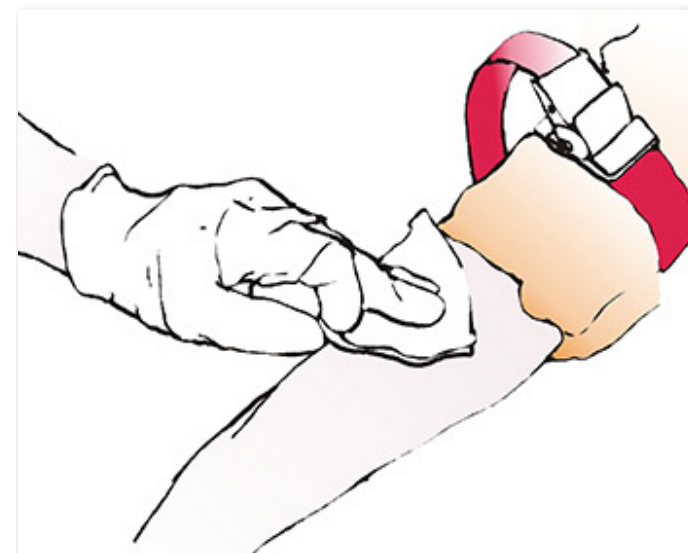

»

10

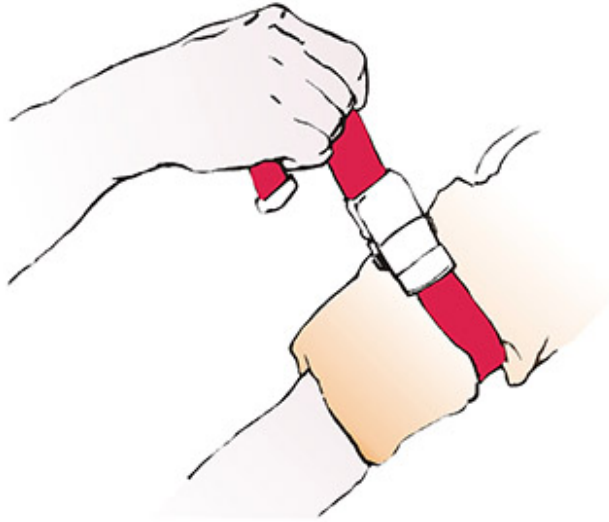


Utáhněte zaškrcovadlo.

11




Navlékněte si pravou rukavici.

12

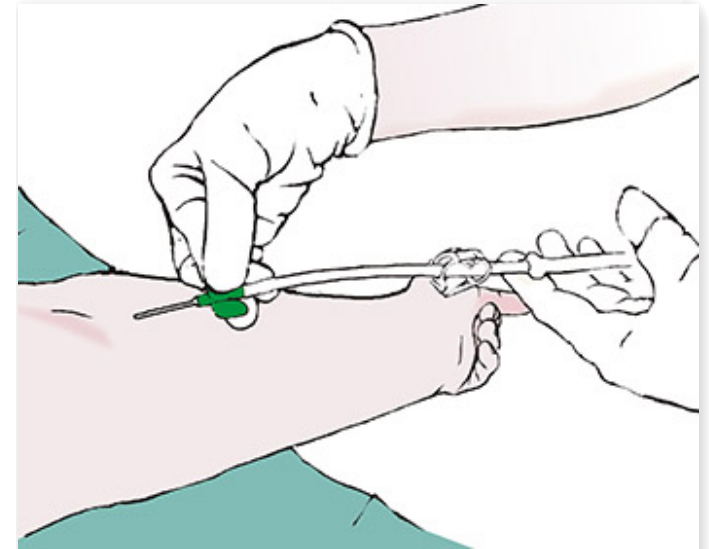

Umístěte kanyly do žil.

13

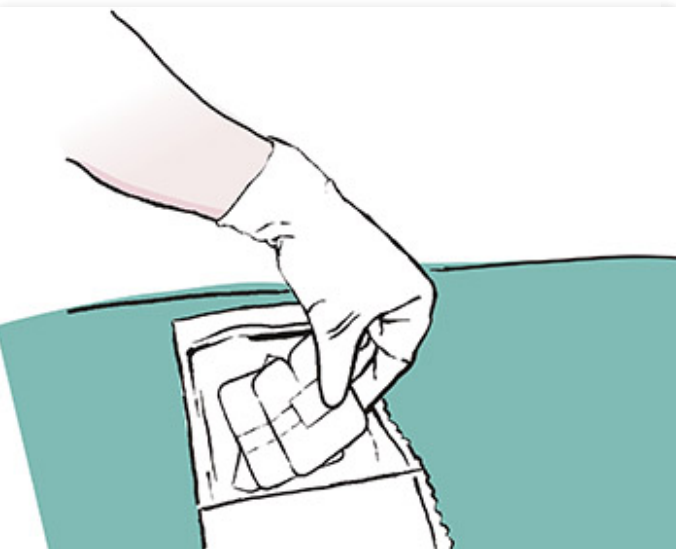


Po zavedení každé kanyly je zafixujete speciálním krytím pro fixaci kanyly (také v sadě).

14




15

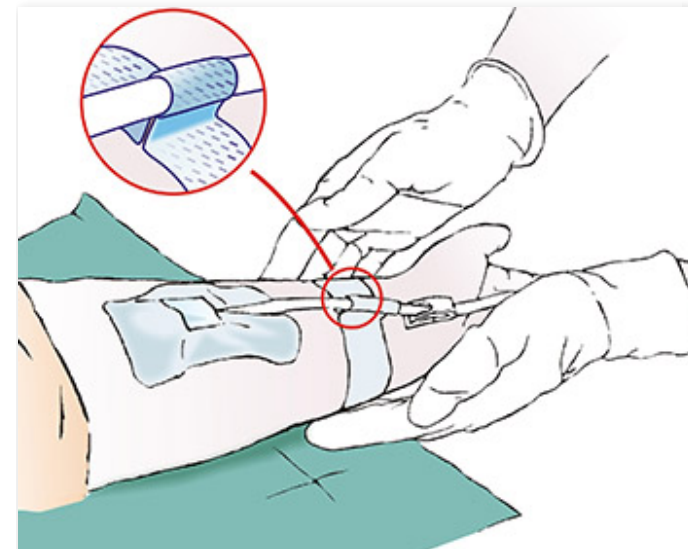

Na konci zajistěte odtok kanyly pomocí netkaných lepicích pásek.

16

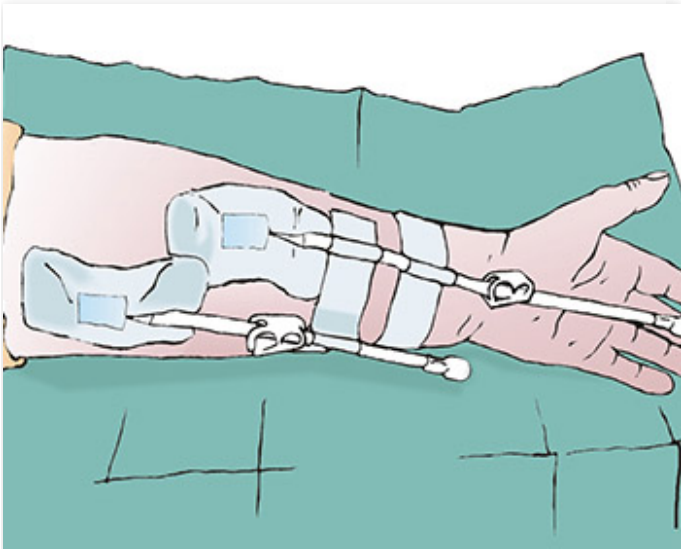

Nyní je pacient napojen na „umělou ledvinu“. Dialýza trvá 3-4 hodiny.