

Příklad sady pro odpojení dialýzy MA-991-ZEST-488.

1



Před dokončením procedury si umyjte ruce (odborník).

2



Otevřete sadu pro odpojení dialýzy.

3



Nasadte pacientovi jednu rukavici.


Matoset sada pro odpojení dialýzy - způsob aplikace

4




Poté si specialista nasadí obě rukavice.

5

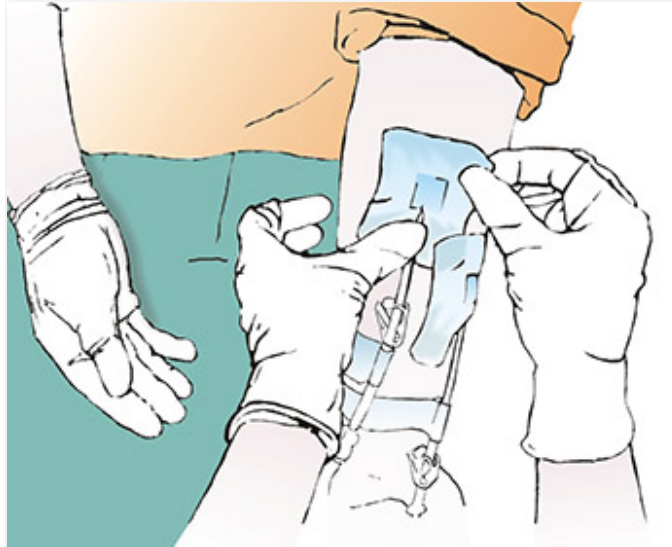


Postupně vyjměte kanyly a s pacientovou pomocí zajistěte místa vpichu tampony.

6

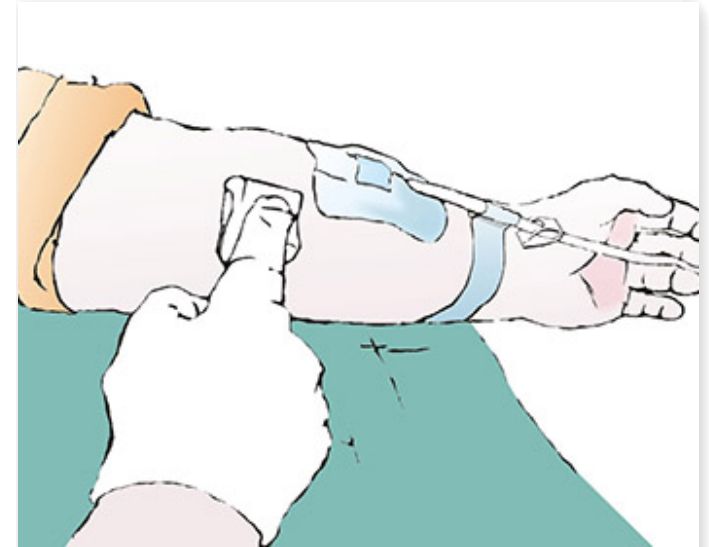

»

7

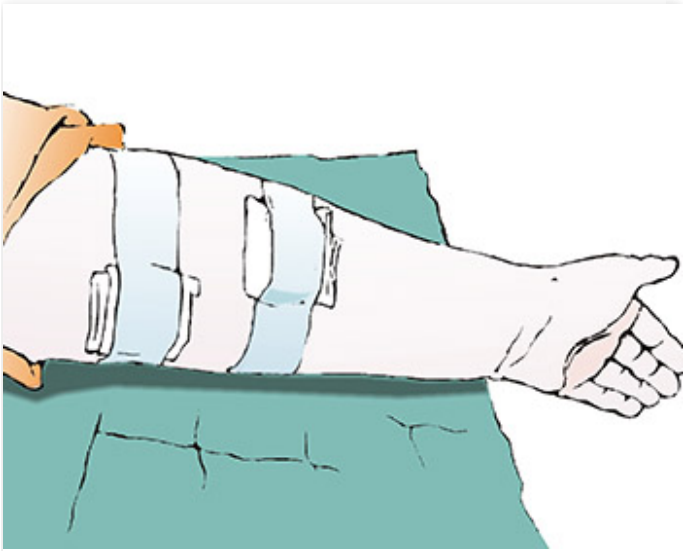

Po odstranění obou kanyl musí být místa vpichu chráněna obvazy složenými z netkaných tamponů a lepicích pásek.