

Pro zajištění ochrany míst se zvýšeným rizikem vzniku odřenin nebo opruzenin je třeba zvolit takovou velikost obvazu, aby byla překryta celá ohrožená oblast pokožky. Před aplikací obvazu je třeba si nasadit rukavice a následně důkladně očistit a osušit pokožku. Dalším krokem je aplikace obvazu.

1



Odstraníme ochranný papír (bílý) ze středové spodní části obvazu, uchopíme papírové okraje a umístíme obvaz na pokožku.

2



Odstraníme ochranný papír (bílý) z okrajů a přilepíme zbývající část obvazu. Lehce přitlačíme okraje obvazu.

3



Odstraníme svrchní plastový kryt zatažením za záložky ve směru znázorněném zelenými šipkami.

4



Odstraňte zbývající podkladový papír (bílý) z okrajů a přilepte zbytek obvazu.

5



Jemně stlačte okraje krytí.

6

