

Pro ošetření míst se suchou nekrotickou tkání je třeba připravit si Medisorb G a krytí pro vnější ochranu, například Medisorb F. Je třeba zvolit takovou velikost krytí, aby byla celá rána překryta.

1



Před aplikací obvazu si navlékneme rukavice, opláchneme ránu 0,9% fyziologickým roztokem a osušíme pokožku v okolí rány. Následně vyjmeme tubu Medisorb G z obalu a sejmeme uzávěr. Jemně vymáčkneme gel na povrch rány, přičemž dbáme na zachování čistoty aplikátoru.

2



Vymáčkнутý gel by měl vyčnívat nad povrch odumřelých buněk o minimálně 5 mm.

3



Odstraníme ochranný papír (bílý) ze středové spodní části obvazu, uchopíme papírové okraje a umístíme krytí na pokožku.

4



Odstraníme ochranný papír (bílý) z okrajů a přilepíme zbývající část obvazu. Lehce přitlačíme jeho okraje.

5



Odstraníme svrchní umělohmotný kryt zatažením za záložky ve směru znázorněném zelenými šipkami.

6



Jeden obvaz Medisorb G je určen na jedno použití pro jednoho pacienta.

7



V případě nekrotizujících ran je třeba obvaz Medisorb G měnit ve 24-hodinových intervalech. V případě čistých ran lze gel ponechat na ráně maximálně 3 dny. Obvaz je třeba vyměnit, jakmile dojde k průsaku gelu mimo krycí obvaz.

8



Pro odstranění gelu z rány je třeba ji opláchnout 0,9% fyziologickým roztokem.