

Při ošetřování rány volíme takovou velikost krytí, aby byla překryta celá rána a její okolí v šířce 2-3 cm.

1



Před aplikací krytí si navlékneme rukavice, ránu očistíme 0,9% fyziologickým roztokem nebo Ringerovým roztokem a osušíme pokožku v okolí rány.

2



Zvolíme vhodný rozměr obvazu Medisorb H, tak aby byl zakryt celý povrch rány a 2-3 cm pokožky v jejím okolí. Potřebujeme-li překrýt ránu s velkým povrchem, můžeme použít větší rozměr nebo několik kusů krytí, které se budou překrývat.

3



Před odlepením ochranného papíru zahřejeme krytí v dlaních.

4



Odstraníme ochranný papír. Přiložíme Medisorb H přímo na povrch rány a jemně přitlačíme jeho okraje.

5




Bércové vředy lze, naordinuje-li to lékař, léčit pomocí Medisorb H ve spojení s kompresivní terapií.

6



Pod obvazem se může vytvořit nažloutlý gel s charakteristickým pachem. Není to známkou infekce, jedná se o normální jev spojený s používáním hydrokoloidních obvazů.

7

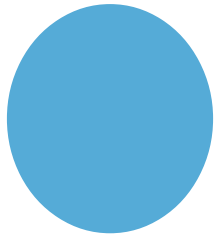

Krytí je třeba vyměnit v okamžiku, kdy se hydrokoloidní vrstva přemění v gel. Interval převazů závisí na množství výpotku. V případě silně exsudujících ran mohou být nutné každodenní převazy. V případě ran s malým množstvím exsudátu a epitelizujících ran lze krytí ponechat na ráně až 7 dnů.