

Pro ošetření rány je třeba zvolit takovou velikost krycího obvazu, aby byla překryta celá rána a její okolí v šířce 2-3 cm.

1



Před aplikací obvazu si navlékneme rukavice, ránu opláchneme fyziologickým roztokem nebo Ringerovým roztokem a osušíme pokožku v okolí rány.

2



Zvolíme vhodný rozměr krytí Medisorb P, tak aby byl překryt celý povrch rány a 2-3 cm pokožky v jejím okolí.

3



Odstraníme větší ochranný papír a přiložíme obvaz na ránu.

4



Odstraníme druhý ochranný papír a přilepíme obvaz jemným přitlačením jeho okrajů na pokožku.

5




V případě používání krytí Medisorb P na místech, která se obtížně ošetřují (pata nebo loket), lze pro usnadnění přilepení obvazu roztáhnout jeho okraje.

6



Při ošetřování proleženin v bederní oblasti je třeba obvaz ohnout, umístit do hýžděové prohlubně a lehkým tlakem vyhladit směrem ven. Pokud je pacient inkontinentní, je navíc nutné zajistit okraje obvazu náplastí.

7

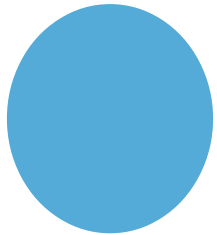

Obvaz je třeba každý den kontrolovat, aby se předešlo případnému prosáknutí výpotku. Neprojevují-li se žádné znepokojivé příznaky, může být obvaz ponechán na ráně až 7 dnů. Obvaz musí být okamžitě odstraněn, jsou-li zjištěny jakékoli klinické příznaky infekce. K používání obvazu Medisorb P se lze vrátit teprve poté, co ustoupí příznaky zánětlivého stavu.