

Před ošetřením rány si připravíme Medisorb P PLUS a krycí obvaz pro jeho vnější zajištění, např. Medisorb F, pruban Codofix® nebo obinadlo.

1




Před aplikací obvazu si navlékneme rukavice, opláchneme ránu fyziologickým roztokem a osušíme pokožku v okolí rány.

2



Otevřeme obal.

3

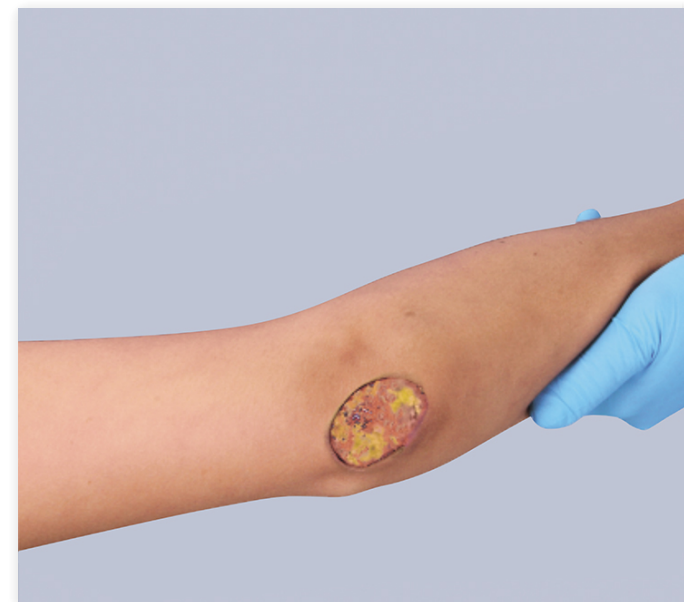

Uchopíme protilehlé okraje obalu (obal z metalizované folie) a tahem jej otevřeme až do úplného odkrytí obvazu.

4



Ujistěte se, že se chystáte přiložit obvaz na ránu správnou stranou! Obvaz Medisorb P PLUS má dvě strany: pórovitý povrch, který je určen pro přímý kontakt s ranou, a hladký lesklý vnější povrch, který chrání ránu před působením vnějšího prostředí.

5



Obvaz asepticky umístíte na ránu. V případě menších ran lze obvaz přistříhnout na velikost umožňující úplné zakrytí rány. Obvaz musí zakrývat povrch rány a asi 2-3 cm pokožky v jejím okolí.

6



Fixaci krytí provedeme pomocí fóliového obvazu Medisorb F, elastického prubanu Codofix® nebo obinadla Matofix COHESIVE.

7



Pokud k fixaci obvazu používáte obinadlo, vždy jej rozbalujte tak, aby nerozvinutá část směřovala ven.

8




Obvaz je třeba kontrolovat každý den a okamžitě jej vyměňovat, pokud se pod ním nahromadí nadměrné množství výpotku nebo pokud se objeví známky zánětlivého stavu, jako je zarudnutí, otok nebo nadměrné zahřátí okolí rány. S léčbou lze pokračovat poté, co zánět ustoupí. Obvaz je třeba vyměnit, pronikne-li výpotek k okraji obvazu nebo začne prosakovat. Převazy se provádějí v průběhu 1-5 dnů, v závislosti na morfologii rány a množství výpotku.

9



V případě potřeby lze krytí Medisorb P PLUS před použitím napustit antibiotickým roztokem.

10

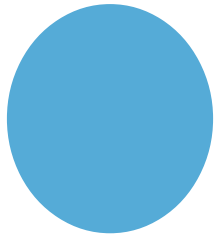

Pokud by bylo množství exsudátu z rány malé, mohl by Medisorb P PLUS vyschnout a přilnout k jejímu povrchu. V tomto případě může při převazu dojít k poranění či krvácení spojenému s bolestí. Aby se to nestávalo, je třeba krytí před jeho odstraněním zvlhčit fyziologickým roztokem.