



1

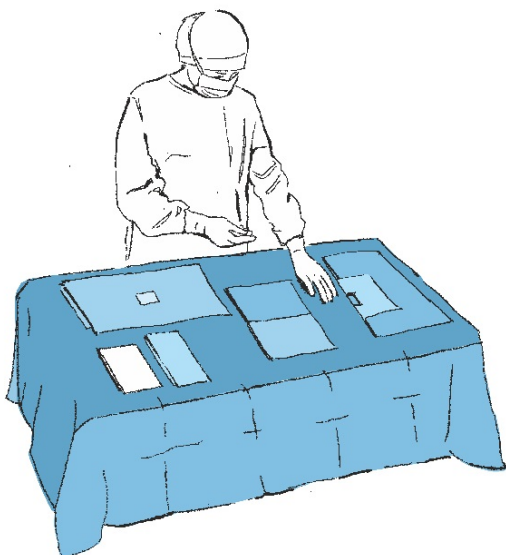


Otevřete vnější obal v souladu se zásadami asepse a soupravu položte na instrumentační stůl. Na stole rozložte vnější roušku a položte na ni ostatní prvky.

2

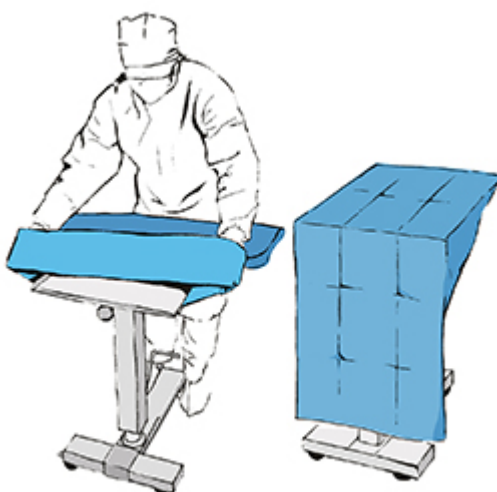

Natáhněte návlek na instrumentační stolek.


3

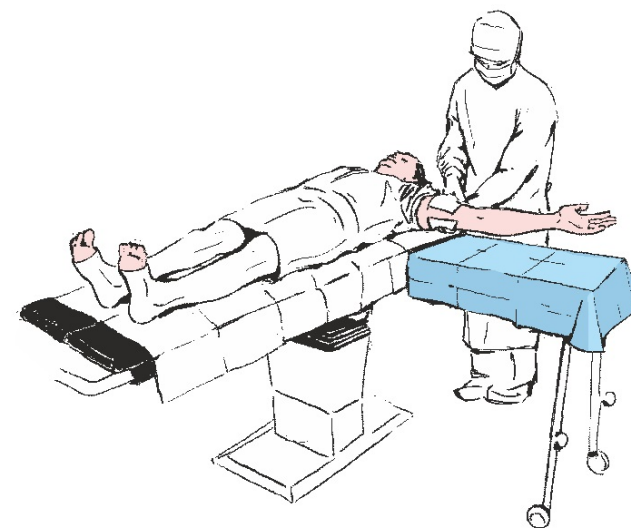

Zvedněte pomocí utěrek horní končetinu, na které bude probíhat zákrok,


Rozložení setu Matodrape pro operaci horních končetin

4

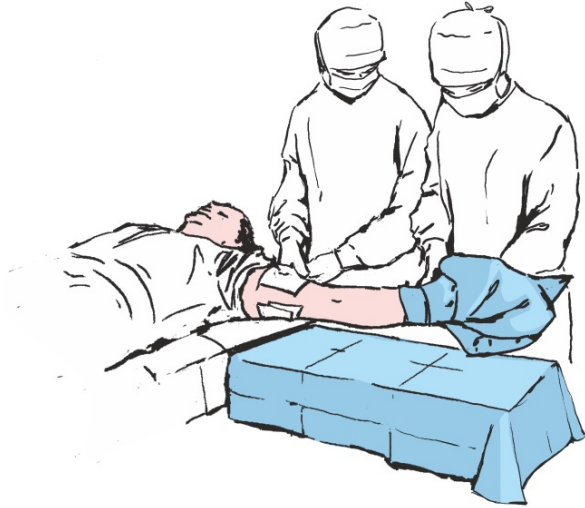

Zakryjte pomocí návleku horní pacientovu končetinu.

5

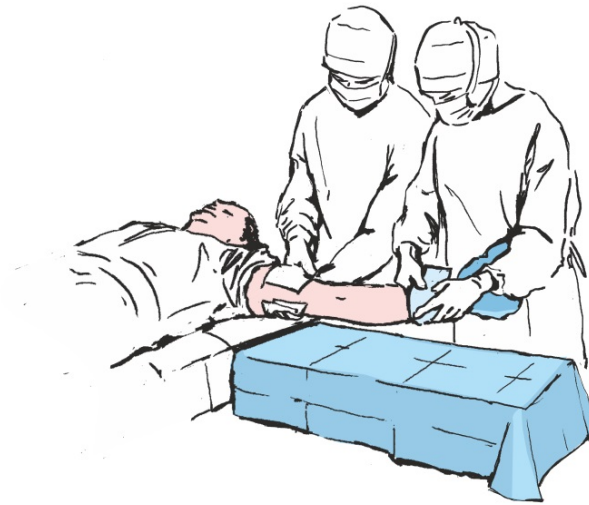

Návlek upevněte ve výšce pacientova předloktí pomocí dodaných upevňovacích pásek.


6



Před zakrytím pacienta (vymezením chirurgického pole) věnujte pozornost piktogramům s vyznačením směru, ve kterém má být rouška rozložena.


Rozložení setu Matodrape pro operaci horních končetin

7

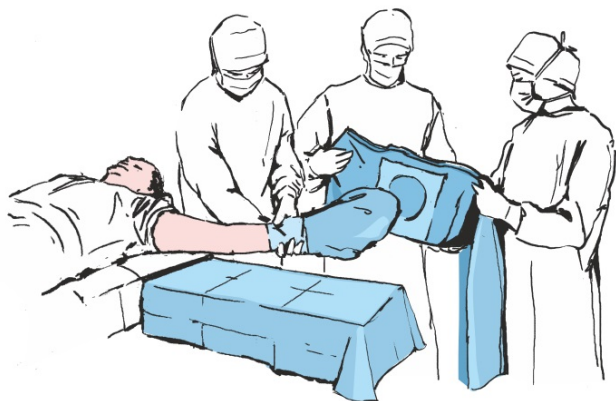


Protáhněte horní končetinu pacienta pružným otvorem v hlavním roušce.

8

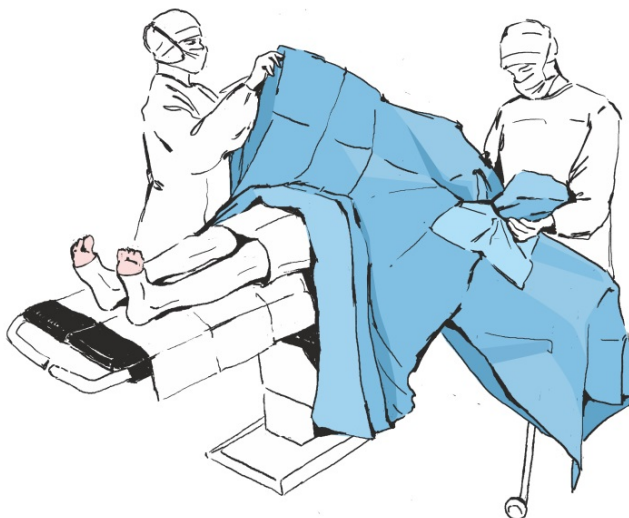

Zakryjte stojan na končetiny bočním rouškou trvale připevněnou k hlavnímu roušce.

9

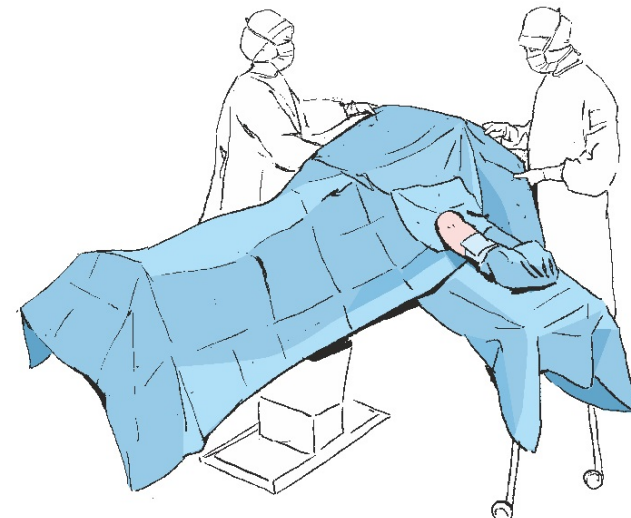

Rozložte spodní část roušky směrem ke spodnímu okraji operačního stolu, čímž ochráníte dolní končetiny pacienta, a poté rozložte roušku směrem ke stojanu pro anestezii. Roušku položte přes rám, čímž vymezení prostor pro anestezii.

10

