



1

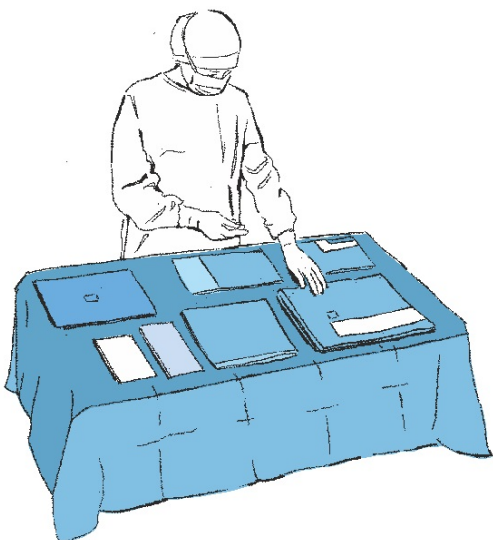


Otevřete vnější obal v souladu se zásadami aseptiky a soupravu položte na instrumentační stůl. Na stole rozložte vnější roušku a položte na ni ostatní prvky.

2

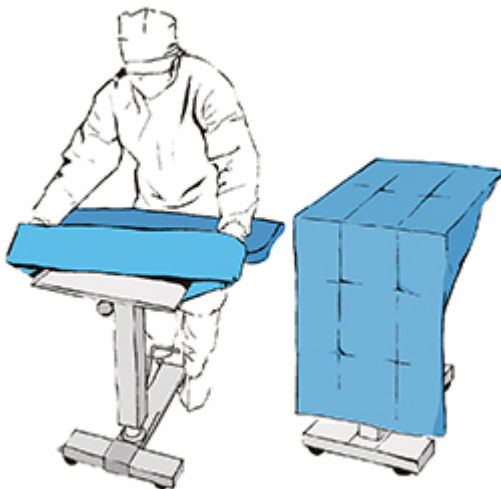

Natáhněte návlek na instrumentační stolek.

3

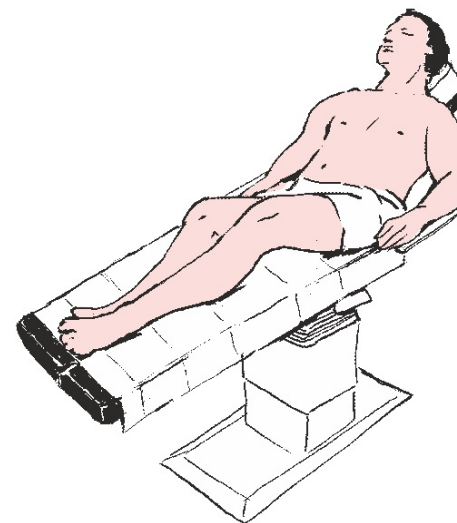


Rozložení setu Matodrape pro operaci ramene

4




Zvedněte horní končetinu, na které bude probíhat lékařský zákrok, pomocí utěrek dodaných se soupravou umístěte pomocnou roušku pod končetinu.

5

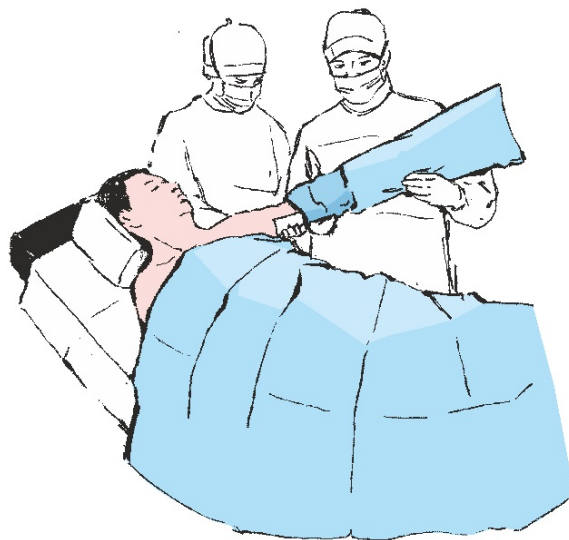


Zakryjte horní končetinu pacienta do výše pod ramenním kloubem.

6

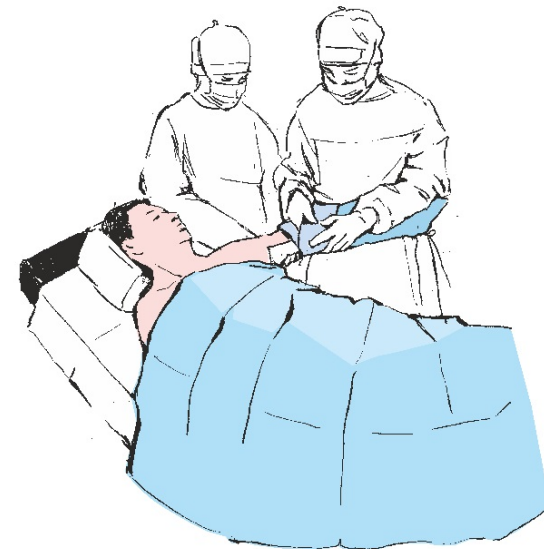

Krytí upevněte pomocí přiložených lékařských pásek.

7

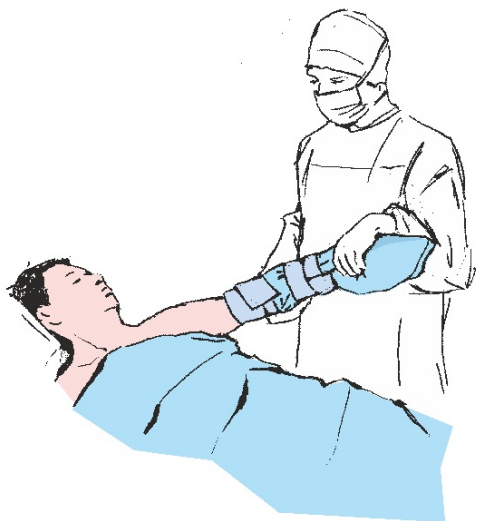

8



Před zakrytím pacienta (vymezením chirurgického pole) věnujte pozornost piktogramům s vyznačením směru, ve kterém má být rouška rozložena.

9



Roušku s výřezem do U umístěte pod pacientovo rameno.

10




Rozložte spodní část roušky směrem ke spodnímu okraji operačního stolu, čímž ochráníte dolní končetiny pacienta.

11




Odstraňte ochranný papír z kratší strany lepicí pásky a roušku pevně přilepte do podpaží pacienta.

12

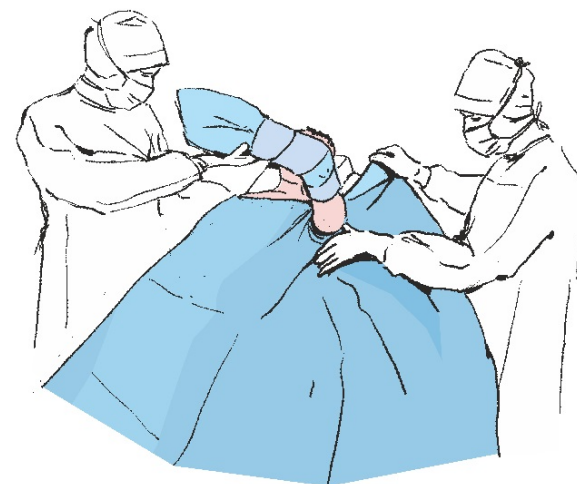

Odstraňte zbývající ochranné papíry a opatrně přilepte roušku kolem ramene směrem k pacientově hlavě, čímž určíte boční meze operačního pole. Poté přitlačte místo na roušce, kde je naneseno lepidlo, k tělu pacienta, aby se zvýšila přilnavost k jeho pokožce.

13

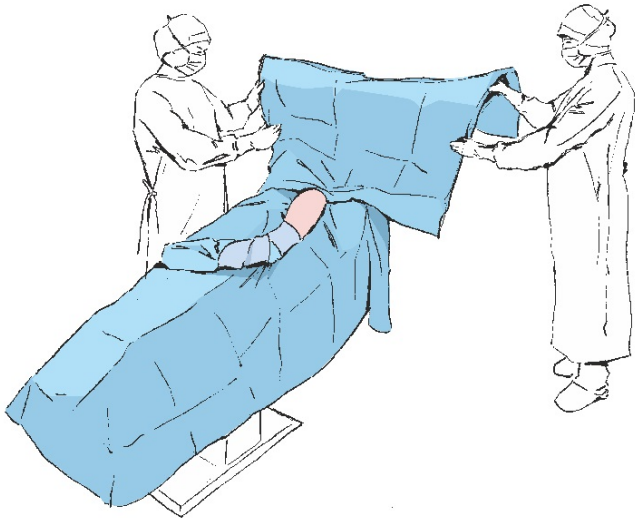

Odstraňte ochrannou pásku z horní části roušky a roušku přilepte. Tím vytvoříte horní hranici operačního pole. Poté přitlačte na místo, kde je naneseno lepidlo. Rozložte roušku ve směru šipek, směrem ke stojanu pro anestezii. Roušku položte přes rám, čímž vymezení prostor pro anestezii.

14

