



1

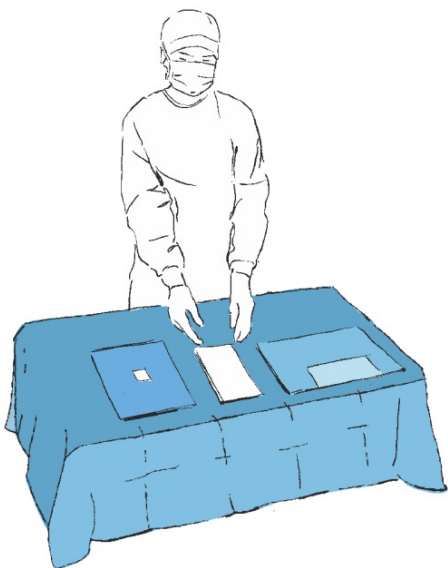

Otevřete vnější obal v souladu se zásadami aseptiky a soupravu položte na instrumentační stůl. Na stole rozložte vnější roušku a položte na ni ostatní prvky.

2

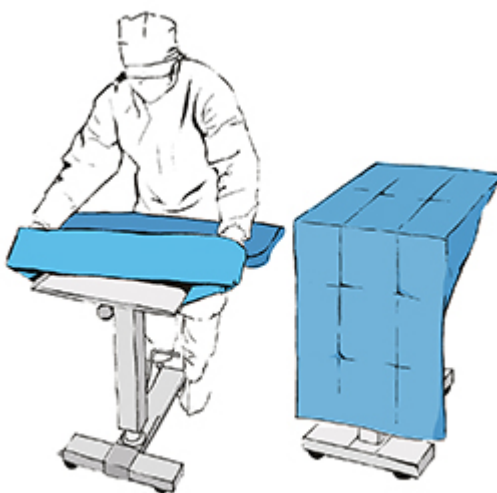


Natáhněte návlek na instrumentační stolek.

3



Před zakrytím pacienta (vymezením chirurgického pole) věnujte pozornost piktogramům s vyznačením směru, ve kterém má být rouška rozložena.

4

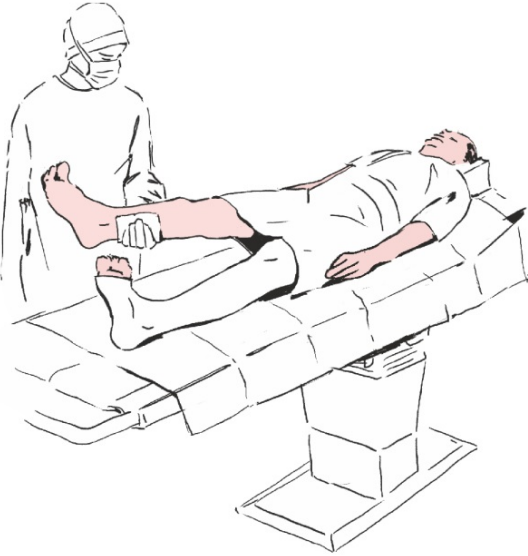


Zvedněte končetinu, která je předmětem lékařského zákroku, pomocí utěrek, které jsou součástí sady.

5




Protáhněte končetinu pacienta elastickým otvorem v hlavní roušce.

6

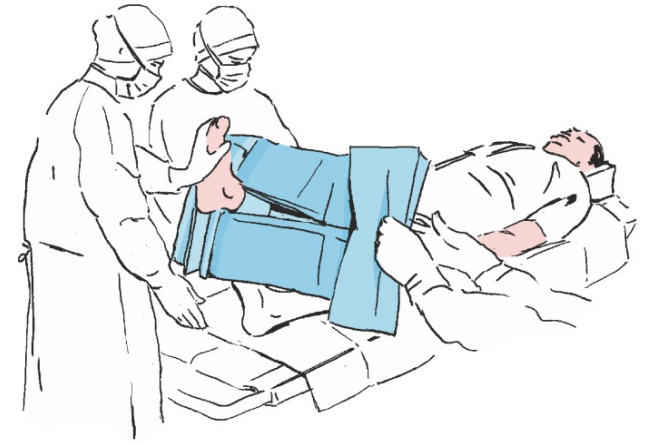

7

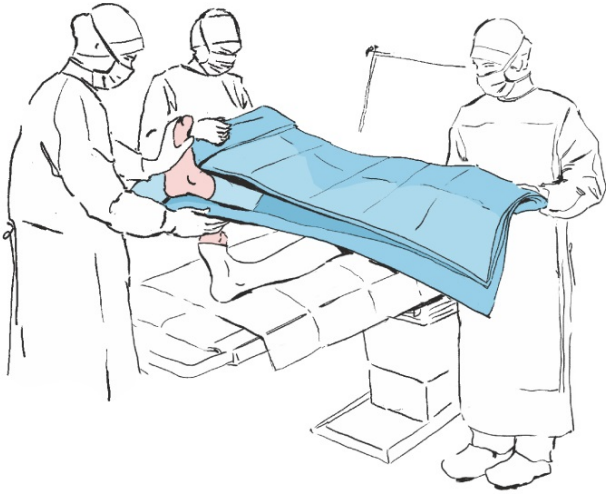

Rozložte strany roušky tak, aby volně visely z operačního stolu. Rozložte horní část roušky směrem k hlavě pacienta (směrem ke stojanu pro anestezii). Roušku umístěte přes rám a vytvořte tak anestetický prostor.

8



Rozložte spodní část roušky směrem ke spodnímu konci operačního stolu, abyste zakryli pacientovi dolní končetiny.

9

