

Obvaz pro upevnění kanyl Cannula F díky své jednoduché konstrukci z netkané textilie laminované fólií zajišťuje spolehlivé a bezpečné upevnění kanyl. Obvaz je nepropustný pro choroboplodné zárodky, bakterie a tekutiny, díky průhlednému povrchu je možné vizuálně kontrolovat místo vpichu. Fólie se vyznačuje vysokou paropropustností. Díky tomu lze předcházet kondenzaci vlhkosti a maceraci pokožky. Správně provedený obvaz může být ponechán na pokožce až 3 dny.

1



Zasuneme kanylu do cévy.

2



Sejmeme papír zajišťující lepící fóliovou část kanyl a umístíme ji na dlaň pacienta. Do průstřihu mezi křídélky je třeba umístit uzávěr kanyl.

3



Odlepíme ochranný papír z křidélek a přilepíme je po stranách kanyl.

# Použití obvazu z fólie a netkané textilie pro upevnění kanyl Cannula F

4



Odlepíme vnější ochrannou fólii kanyly jejím uchopením za modrý proužek.

5



Konečný výsledek správně provedeného obvazu.