

Na ošření rány připravte Tromboguard® a sekundární obvaz pro fixaci, např. elastickou obvazovou síťku nebo obvaz Matofix COHESIVE.

1



Před aplikací krytí si nasadte rukavice.

2



Otevřete balíček. Uchopte protilehlé okraje obalu (z kovové fólie) a zatáhněte, aby se obvaz plně objevil.

3



Dbejte na to, aby byl obvaz aplikován na ránu sorávnou stranou! Tromboguard® má dvě vrstvy:

4




- drsná aktivní vrstva, která by měla být aplikována v přímém kontaktu s krvácejícím povrchem,
- hladká, lesklá vrstva, která by měla být použita jako vnější povrch chránící ránu před vnějšími faktory.

5



Obvaz by měl být aplikován na krvácející ránu asepticky. U menších ran zastříhnete obvaz na vhodnou velikost umožňující úplné zakrytí rány s přesahem 2-3 cm. V případě větších ran je povoleno aplikovat větší počet obvazů.

6

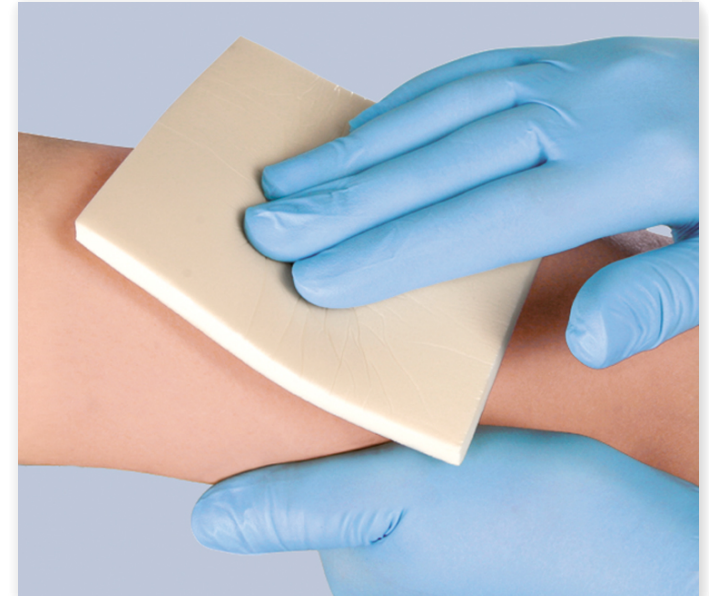

Dbejte na přímé a úplné zakrytí rány obvazem.

7



Na postižené místo vyvíjejte tlak trvajícím přibližně 3 minuty, dokud nedojde ke zvládnutí / snížení krvácení.

8



Obvaz by měl být fixován pomocí elastické obvazové sítky Codofix® nebo obvazu (na obrázku obvaz Matofix COHESIVE).