



1

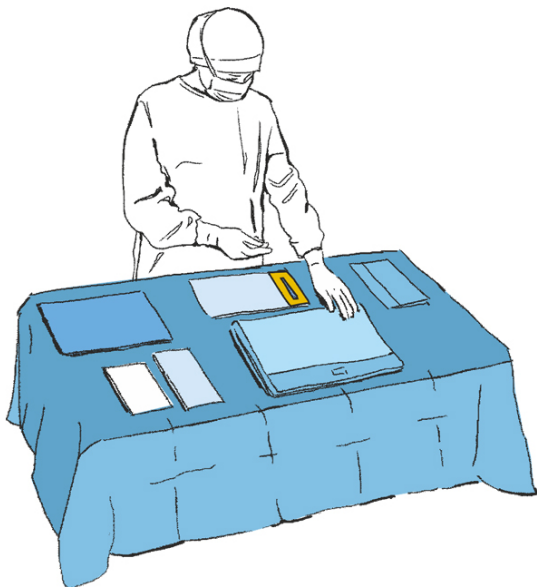

Otevřete vnější obal v souladu se zásadami asepse a soupravu položte na instrumentační stůl. Na stole rozložte vnější roušku a položte na ni ostatní prvky.

2

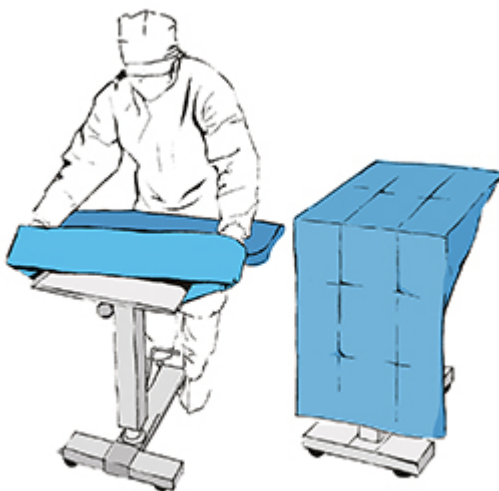


Natáhněte návlek na instrumentační stolek.

3




Před zakrytím pacienta (vymezením chirurgického pole) věnujte pozornost piktogramům s vyznačením směru, ve kterém má být rouška rozložena.

4

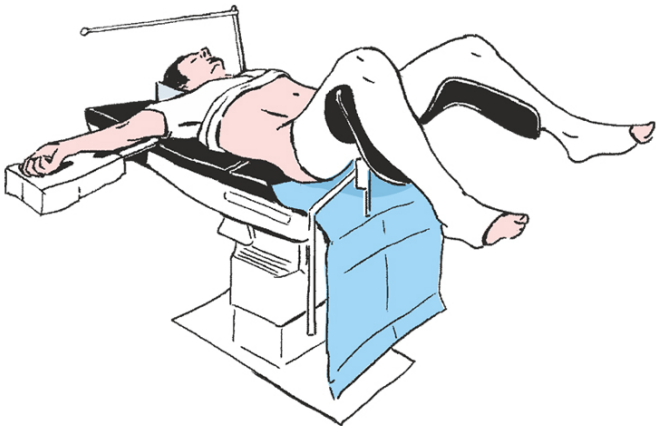


Menší roušku umístíte pod hýždě pacienta, který je v urologické / gynekologické poloze.

5

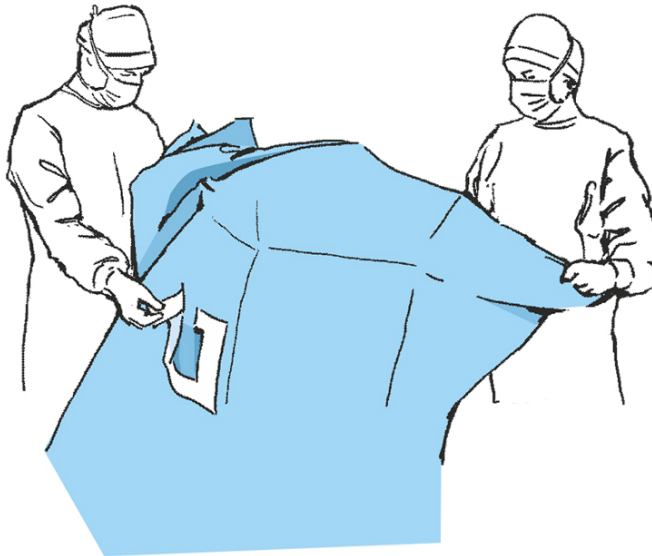

Rozložte okraje roušky do stran a odstraňte ochranný papír z otvoru pro rozkrok.


6

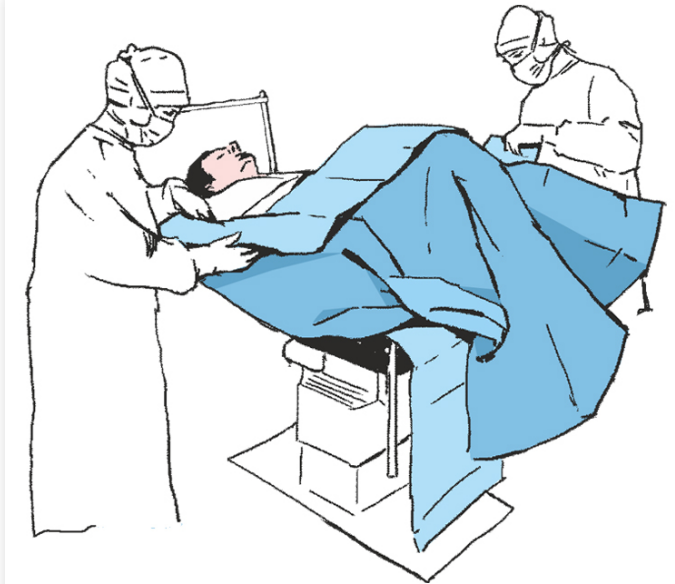

Natáhněte roušku na nohy pacienta a roušku přichyťte k rozkroku pacienta, čímž definujete operační pole.

Rozložení břišní-perineální sady Matodrape

7

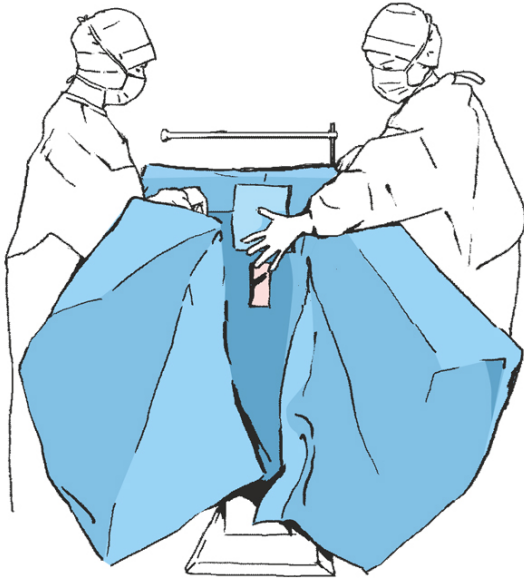

Poté přitlačte místo na roušce, kde je nanášeno lepidlo, k tělu pacienta, aby se zvýšila přilnavost k jeho pokožce.

8



Rozložte spodní část roušky mezi pacientovými dolními končetinami.

9




Odstraňte ochranný papír z břišního okénka a přelepte jej. Tím definujete operační pole. Poté přitlačte místo na roušce, kde je nanášeno lepidlo, k tělu pacienta, aby se zvýšila přilnavost k jeho pokožce.

10



Rozložte strany roušky tak, aby volně visely z operačního stolu. Rozložte horní část roušky směrem k hlavě pacienta (směrem ke stojanu pro anestezii). Roušku umístěte přes rám a vytvořte tak anestetický prostor.

11

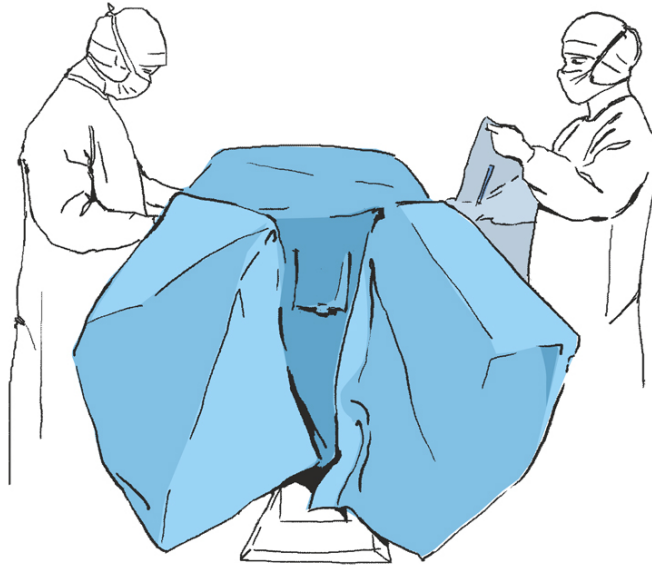

Na vybrané místo připevněte dvoukomorový fóliový sáček.

12

