


1

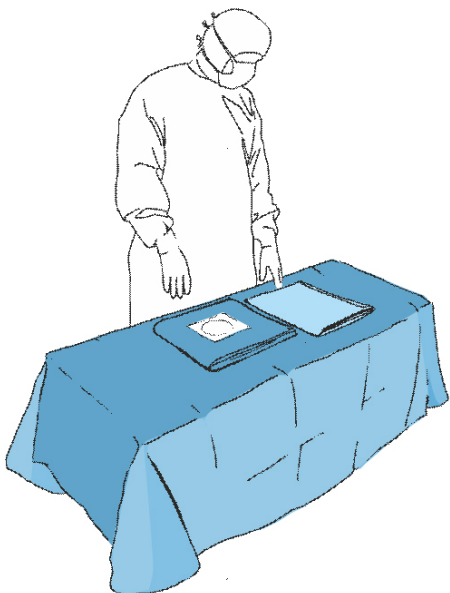


Otevřete vnější obal v souladu se zásadami asepsy a soupravu položte na instrumentační stůl. Na stole rozložte vnější roušku a položte na ni ostatní prvky.

2




Před zakrytím pacienta (vymezením chirurgického pole) věnujte pozornost piktogramům s vyznačením směru, ve kterém má být rouška rozložena.

3

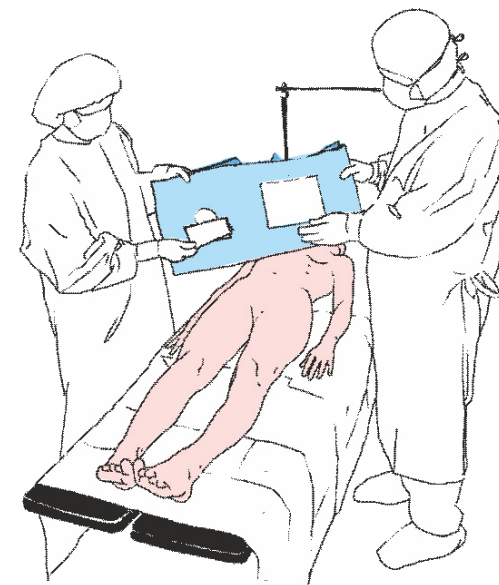


Odstraňte ochranný papír ze zvoleného otvoru v hlavní roušce. Druhý otvor zůstává zakrytý.

4

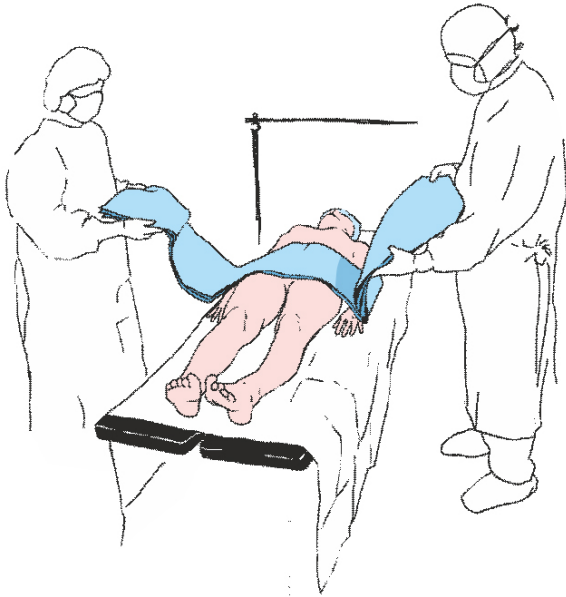

Roušku přilepte, čímž definujete operační pole. Poté přitlačte místo na roušce, kde je nanášeno lepidlo, k tělu pacienta, aby se zvýšila přilnavost k jeho pokožce.

5

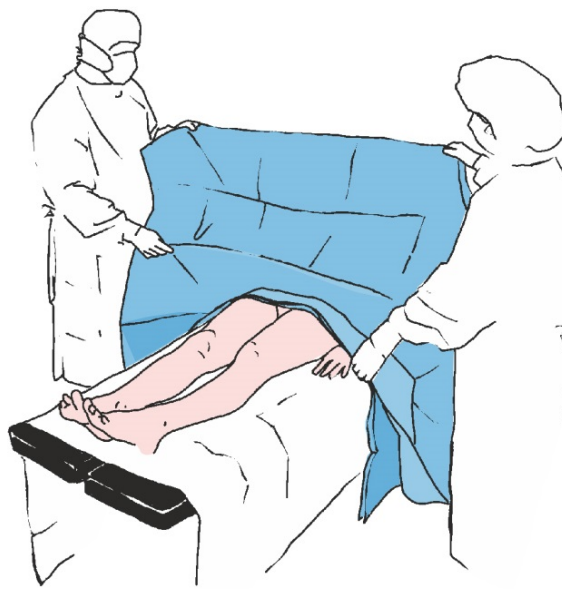


Rozložte boky roušky tak, aby visely volně z operačního stolu a horní část roušky rozložte směrem k pacientově hlavě (ve směru šipek - směrem ke stojanu pro anestezii).

6




Rozložte spodní část roušky směrem ke spodnímu konci operačního stolu a zakryjte tak dolní končetiny pacienta.

7

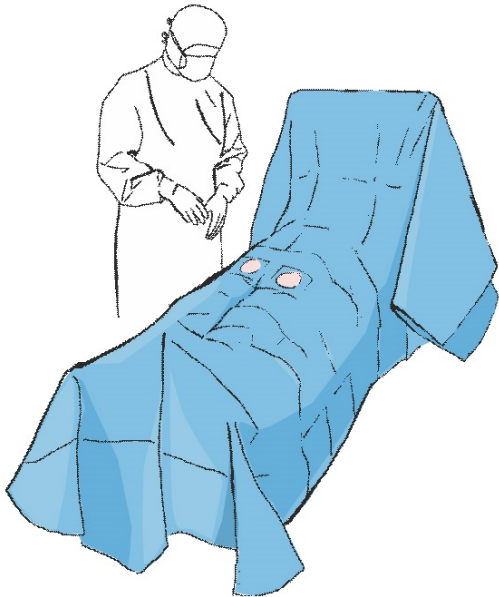

Menší rouška umístěte na monitorovací obrazovku oddělující hlavu pacienta od operačního pole.

8

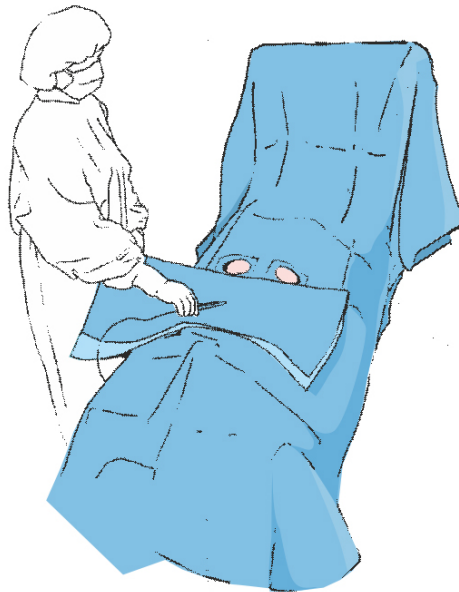

Nakonec zakryjte pacienta druhou menší rouškou.