


1



Otevřete vnější obal v souladu se zásadami asepsy a soupravu položte na instrumentační stůl. Na stole rozložte vnější roušku a položte na ni ostatní prvky.

2

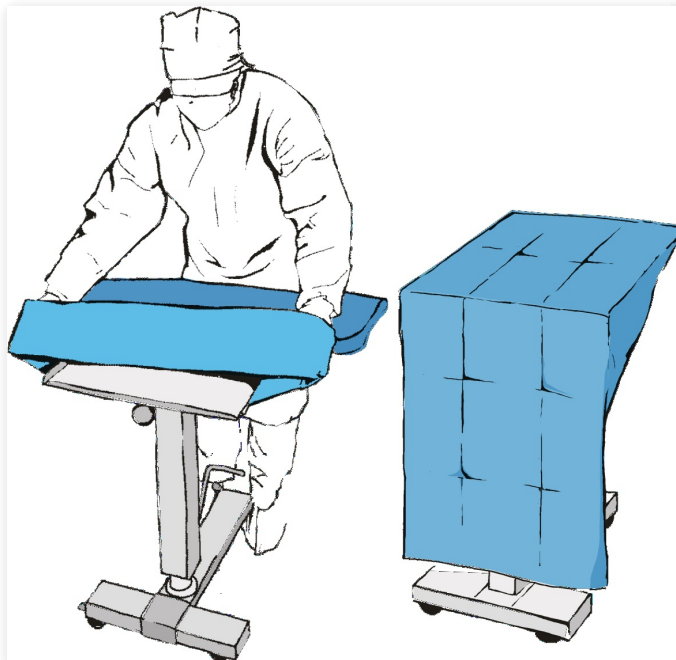

Natáhněte návlek na instrumentační stolek.


3



Před zakrytím pacienta (vymezením chirurgického pole) věnujte pozornost piktogramům s vyznačením směru, ve kterém má být rouška rozložena.


Rozložení setu Matodrape pro bypass operace

4

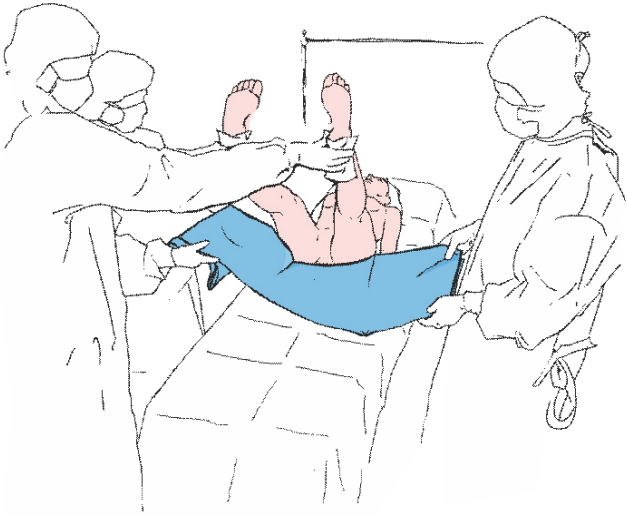


Zvedněte pacientovy dolní končetiny a použijte přitom utěrky Matodrape. Pod zvednuté nohy položte roušku s rozparkem.

5

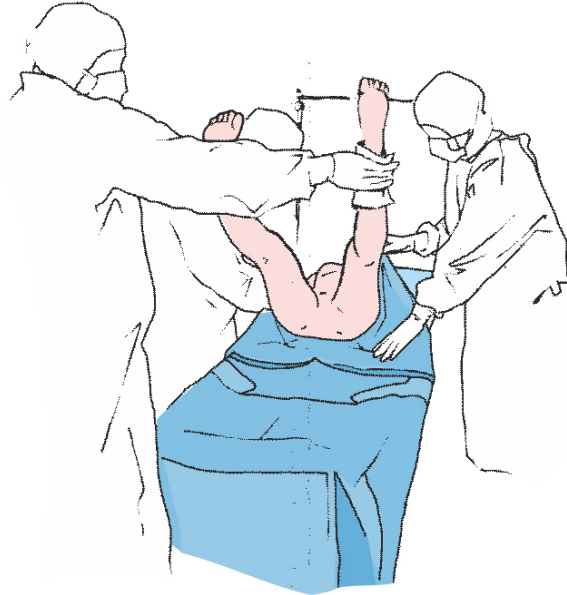

Roztáhněte roušku směrem ke spodnímu konci operačního stolu.


6

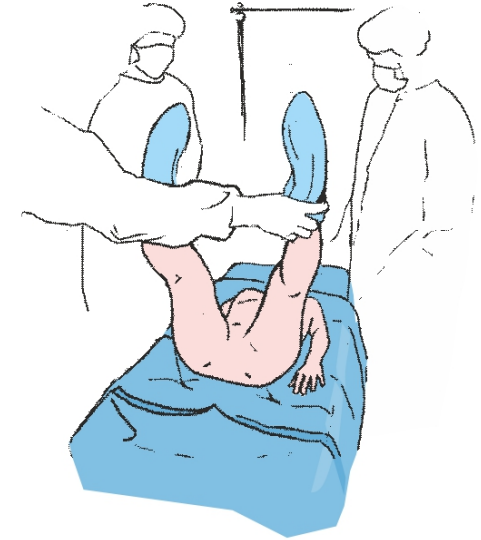

Nasadte návleky na nohy pacienta a pevně je upevněte kolem kotníků.

Rozložení setu Matodrape pro bypass operace

7

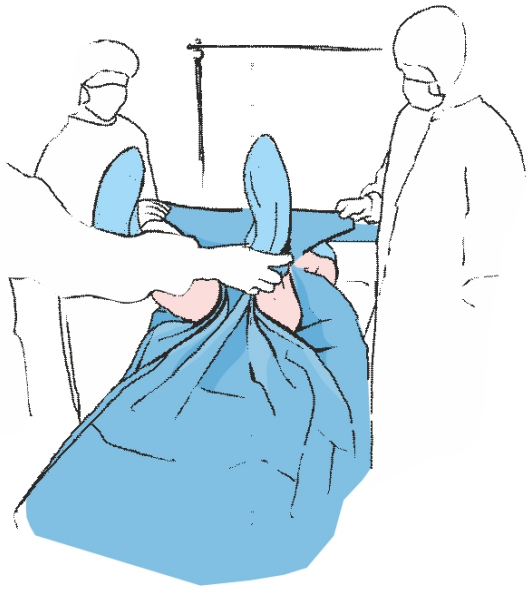


Protáhněte rozkrok (část roušky) mezi stehny pacienta ...

8



... odstraňte ochranný papír a okraj roušky přilepte na
spodní část břicha.


9

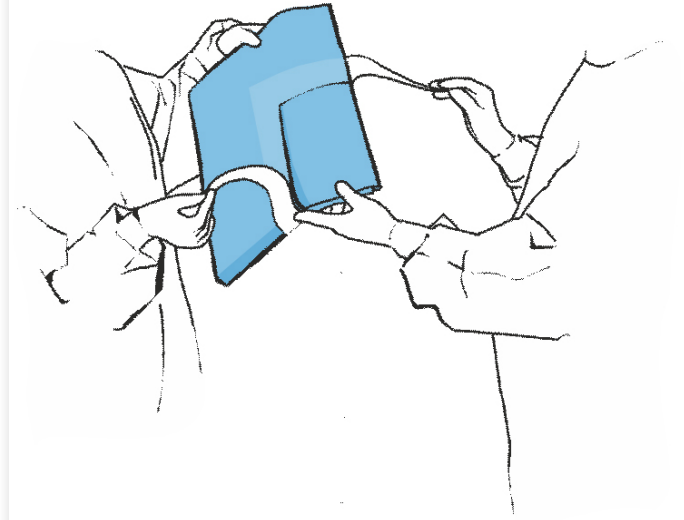

Odstraňte ochranný papír i z otvoru druhé roušky.


Rozložení setu Matodrape pro bypass operace

10

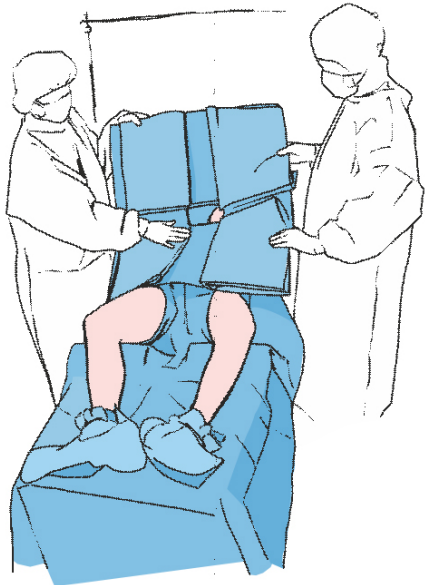


Přilepte roušku k hrudi pacienta, čímž vymezíte operační pole. Poté přitlačte místo na roušce, kde je nanášeno lepidlo, k tělu pacienta, aby se zvýšila přilnavost k jeho pokožce.

11

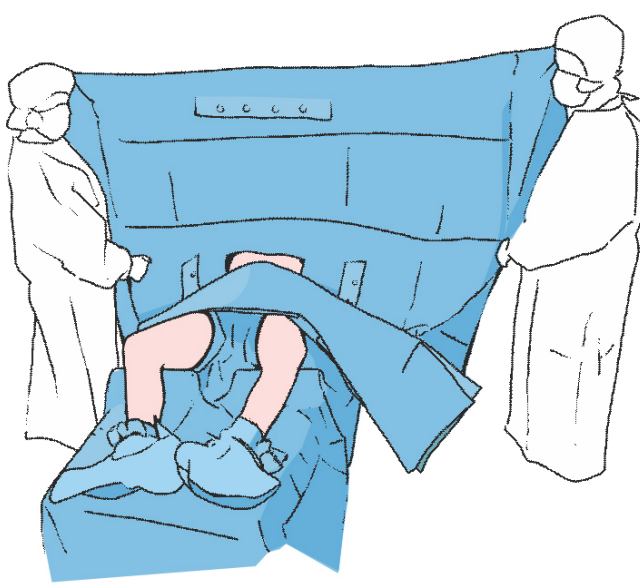


Rozložte boky roušky tak, aby visely volně z operačního stolu a horní část roušky rozložte směrem k pacientově hlavě (ve směru šipek - směrem ke stojanu pro anestezii). Roušku položte přes rám, nebo ji připevněte ke stojanům, čímž vymezíte prostor pro anestezii.

12

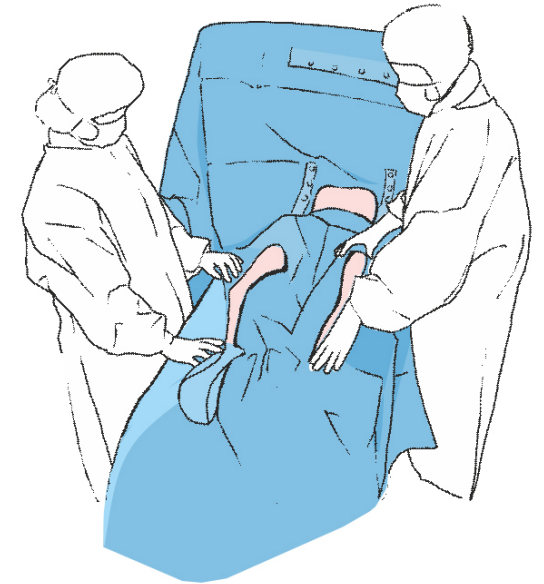

Rozložte i spodní část roušky směrem ke spodnímu konci operačního stolu a vymezte hranice operačního pole pomocí dvou podélných otvorů.

13

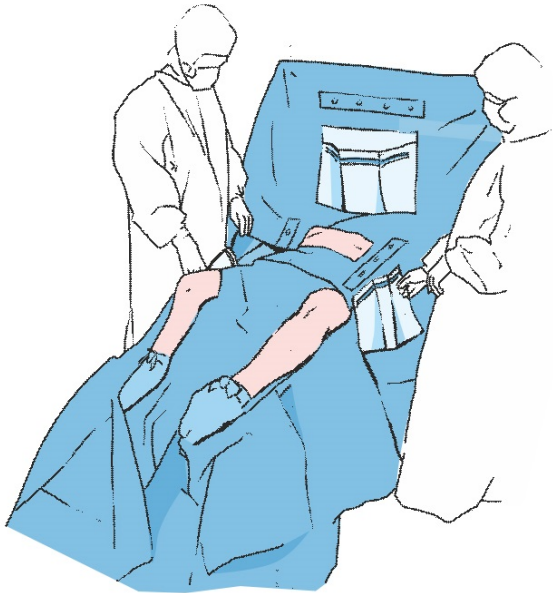

Nakonec připevněte na roušku fóliové sáčky (odstraňte ochranný papír z lepicí vrstvy).