



1

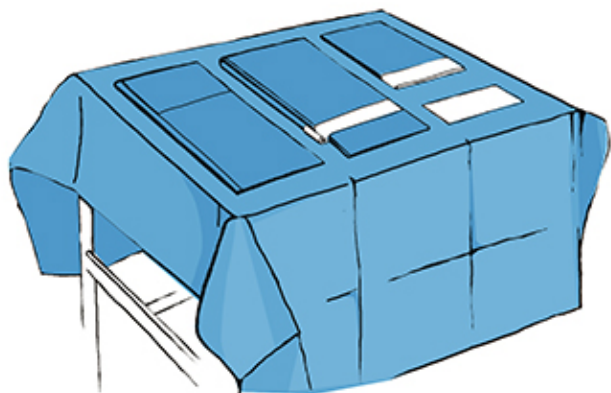

Po otevření obalu položíme rouškování na pomocný stolek. Vnější rouškou přikryjeme stolek a ostatní prvky. Rozložíme obsah balení na stolku, věnujeme pozornost piktogramům na rouškách označujícím místo jejich použití.

2

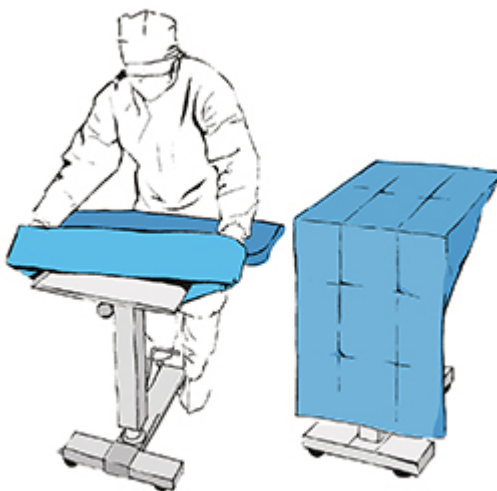

Natáhneme pytlový návlek na instrumentační stolek.


3



Odstraníme ochranný papír z chirurgické fólie v hlavní roušce a upevníme ji na břicho pacientky.


# Rozložení setu pro císařský řez Matodrape

4

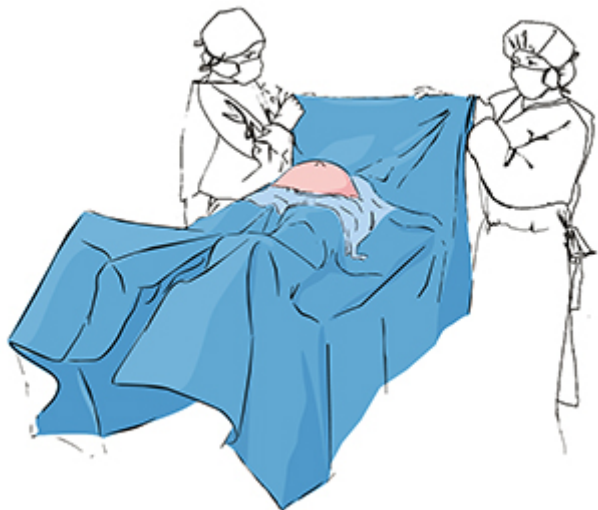

Roztáhneme spodní část roušky na nohy pacientky a následně roztáhneme horní část roušky ze strany hlavy pacientky a upevníme ji k anesteziologickému monitoru pomocí lepících pásek v rozích roušek.

5

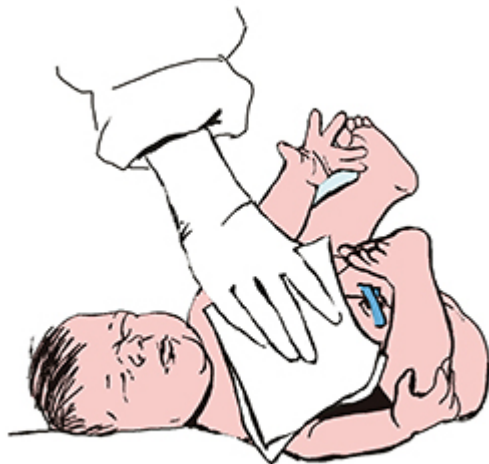

Otřeme novorozence přiloženými rouškami z měkké, bílé netkané textilie.

6



Zabalíme novorozence do podložky Seni Soft a nasadíme mu na hlavu čepičku.