


1



Otevřete vnější obal v souladu se zásadami asepse a soupravu položte na instrumentační stůl. Na stole rozložte vnější roušku a položte na ni ostatní prvky.

2

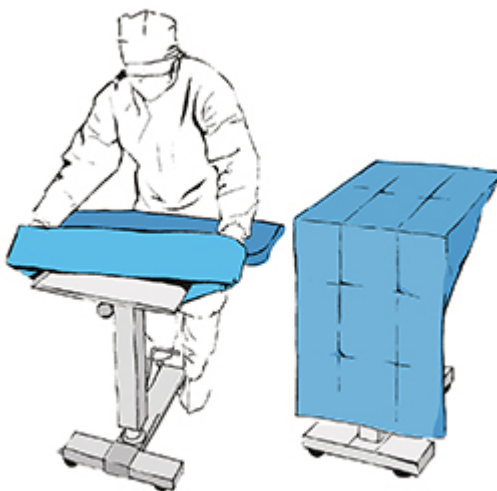

Natáhněte návlek na instrumentační stolek.


3




Před zakrytím pacienta (vymezením chirurgického pole) věnujte pozornost piktogramům a vyznačením směru, ve kterém má být rouška rozložena.

Rozložení setu Matodrape pro kraniotomii

4

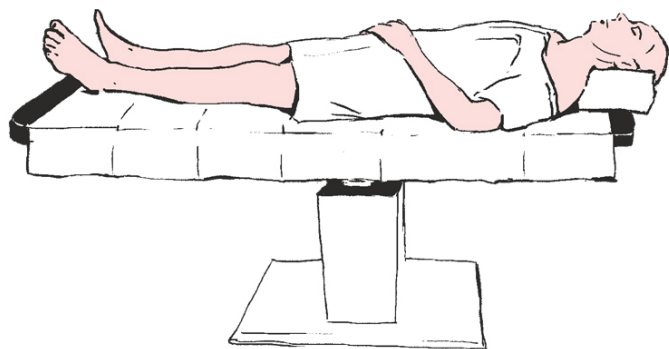


5

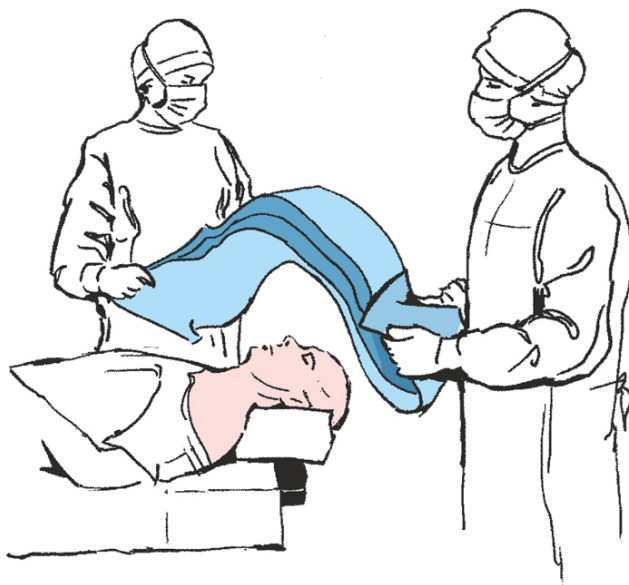


Rozložte strany roušky přes hlavu pacienta pomocí dvou osob tak, aby strany roušky volně visely z operačního stolu,
...

6

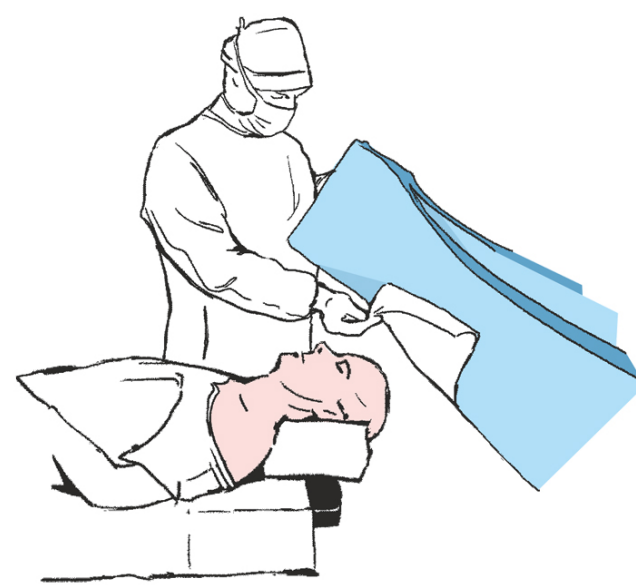


... potom odstraňte papírovou vrstvu, která chrání chirurgickou vrstvu (film) před otevřením...

7

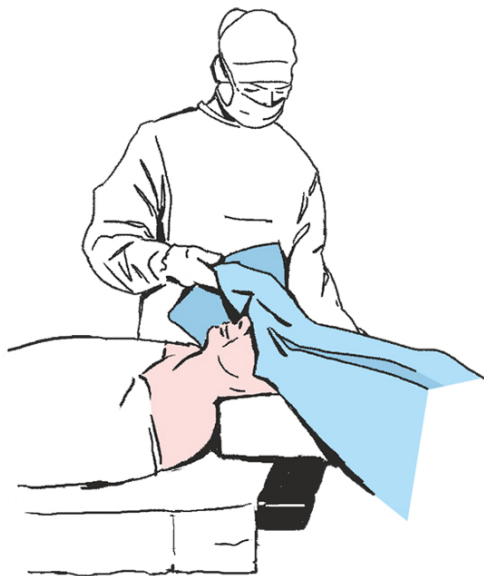

... roušku přilepte, čím vymezíte operační pole.

8

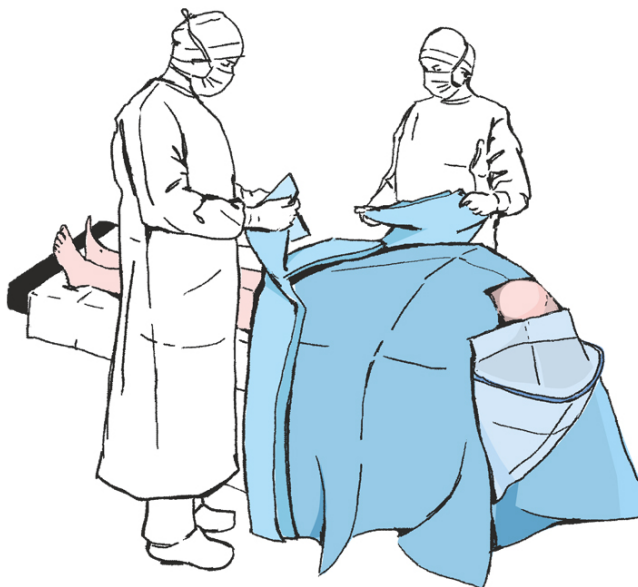


Rozložte spodní část roušky směrem ke spodnímu konci operačního stolu a zakryjte dolní končetiny pacienta.

9




Poté přitlačte místo na roušce, kde je naneseno lepidlo, k tělu pacienta, aby se zvýšila přilnavost k jeho pokožce. Rozložte horní část roušky. Upravte otvor v pouzdru pro sběr kapaliny.

10

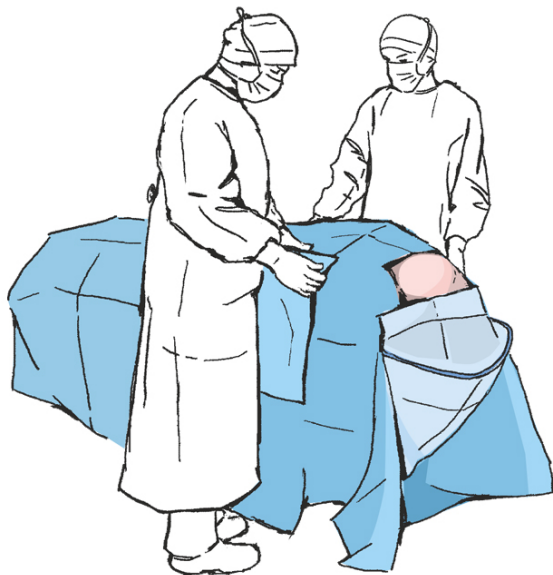


Pravou a levou stranu operačního pole zesilte pomocí dalších roušek, které připevníte pomocí lepicích pásek (ze kterých jste předtím odstranili ochranný papír).

11

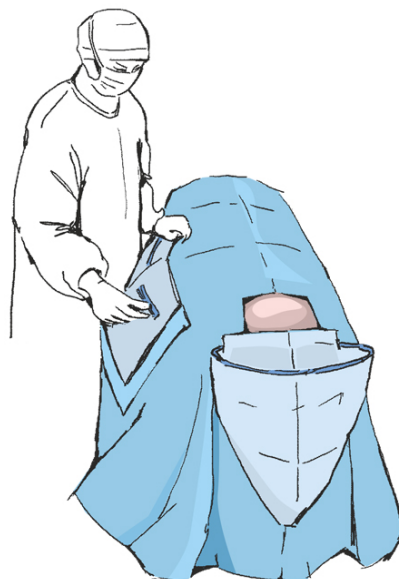


Na stranu roušky připevněte sáček z fólie, aby se v něm mohly hromadit tekutiny unikající z chirurgické rány.

12

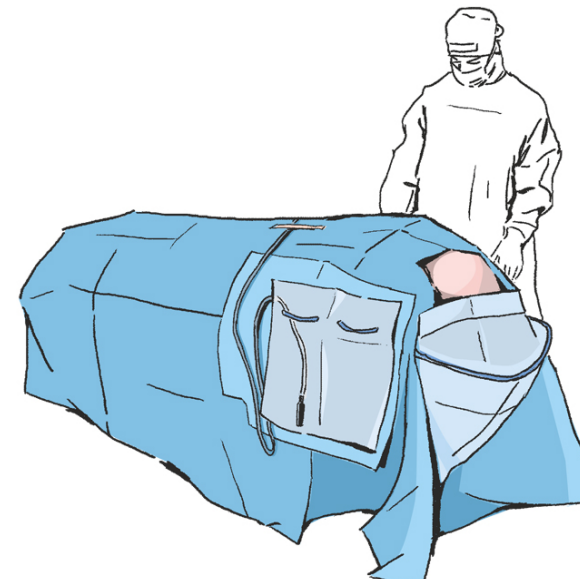

Připevněte lepicí pásky na suchý zip v horní části roušky, abyste mohli uspořádat kabely použité během procedury.

13

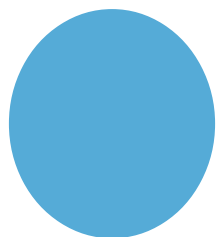

Nakonec připojte odtok k ventilu na vaku na kapalinu.