


1

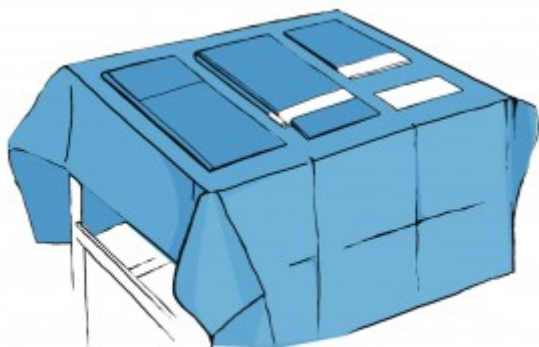

Po otevření obalu položíme rouškování na pomocný stolec. Vnější rouškou přikryjeme stolec a ostatní prvky. Rozložíme prvky na stole.

2



Položíme větší podložku Seni Soft pod hýždě pacientky.

3



Použijeme roušku ze setu pro obalení nohou pacientky pro zajištění sterility operačního pole.

4



Po porodu otřeme novorozence přiloženými rouškami z měkké, bílé netkané textilie.

5



Zabalíme novorozence do menší podložky Seni Soft a nasadíme mu na hlavu čepičku. Instrukce ke stažení PDF.