



1

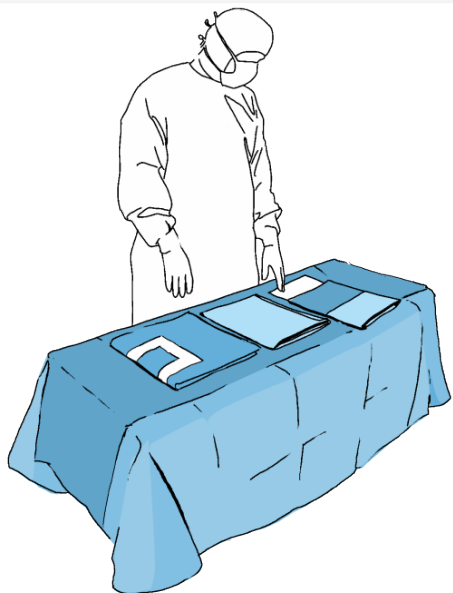


Otevřete vnější obal v souladu se zásadami asepse a soupravu položte na instrumentační stůl. Na stole rozložte vnější roušku a položte na ni ostatní prvky.

2

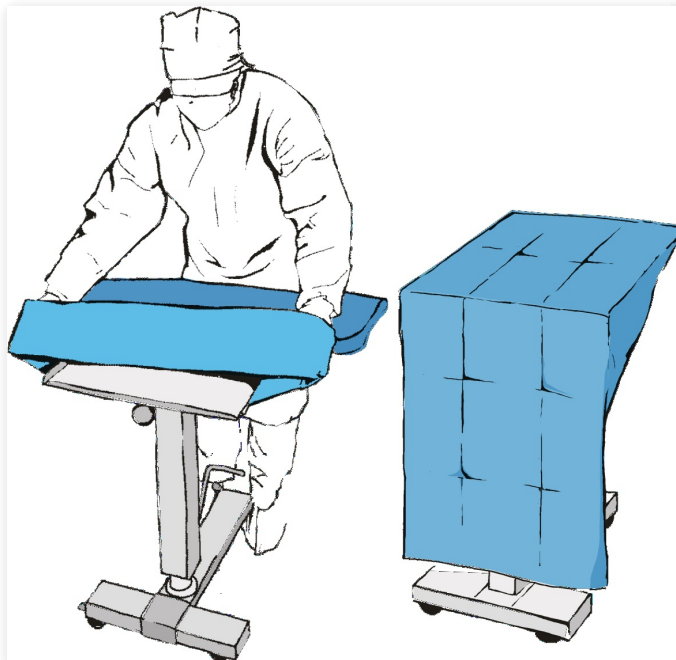

Natáhněte návlek na instrumentační stolek.

3

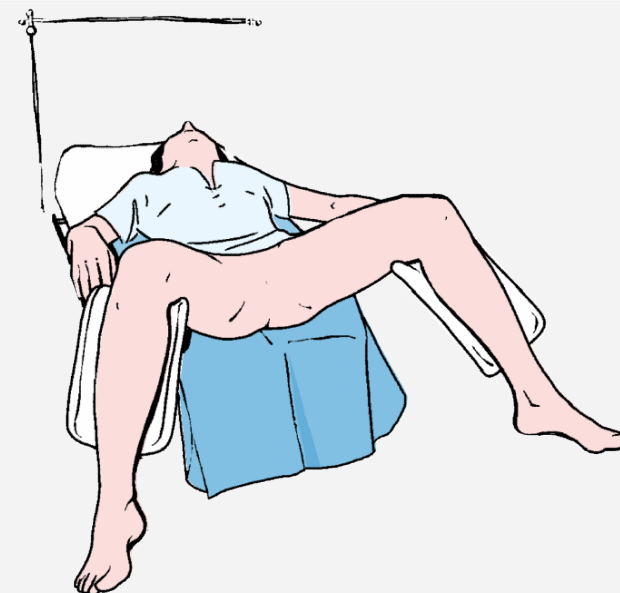

Menší roušku umístěte pod hýždě pacienta, který je v gynekologické poloze.

Rozložení setu Matodrape pro gynekologické operace

4




Na končetiny pacienta nasadte návleky.

5



Před zakrytím pacienta (vymezením chirurgického pole) věnujte pozornost piktogramům s vyznačením směru, ve kterém má být rouška rozložena.


6

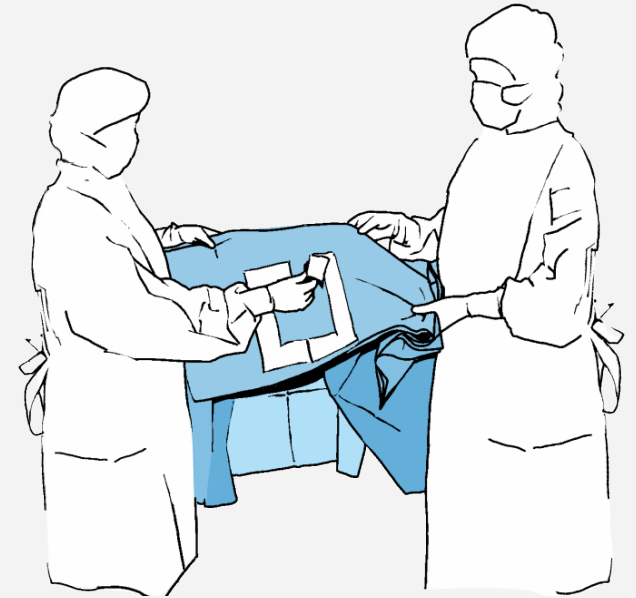

Odstraňte ochranný papír z hlavní fólie.


Rozložení setu Matodrape pro gynekologické operace

7

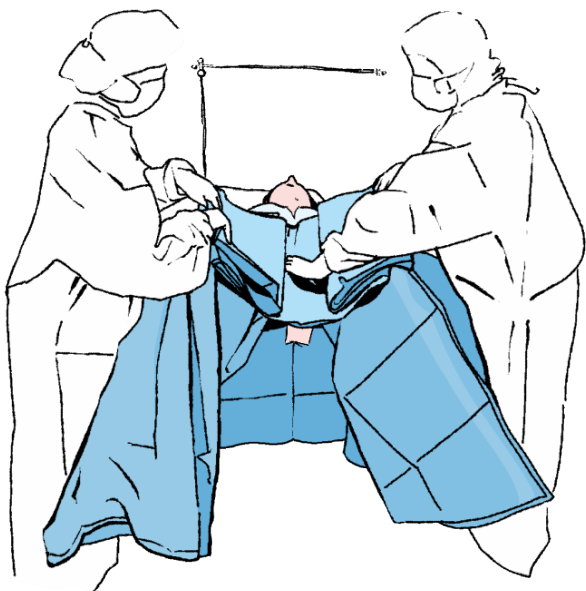

Roušku přilepte a vymezte tak hranici operačního pole. Poté přitlačte místo na roušce, kde je nanášeno lepidlo, k tělu pacienta, aby se zvýšila přilnavost k jeho pokožce.

8

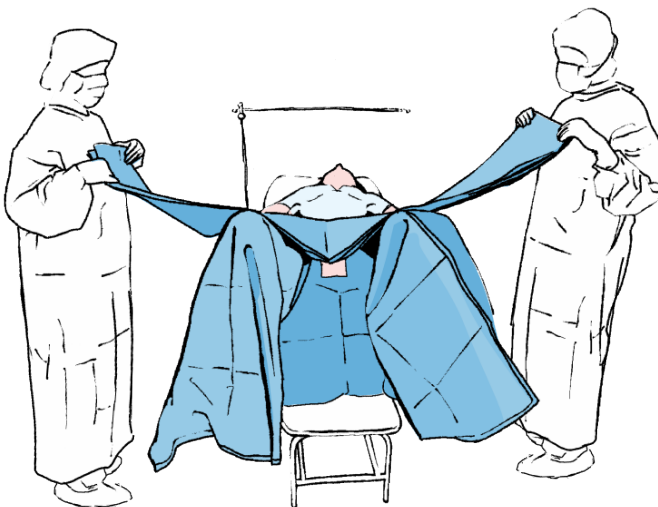

Rozložte strany roušky tak, aby volně visely z operačního stolu. Rozložte horní část roušky směrem k hlavě pacienta (směrem ke stojanu pro anestezii).

9



Roušku umístěte přes rám a vytvořte tak anestetický prostor. Rozložte spodní část roušky směrem ke spodnímu konci operačního stolu, částečně mezi nohama pacienta.