



1

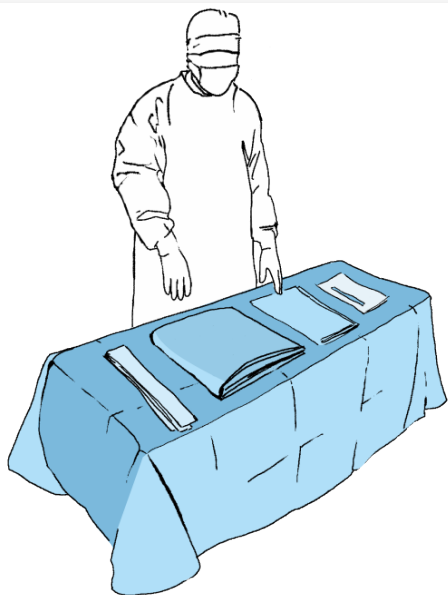

Otevřete vnější obal v souladu se zásadami asepsy a soupravu položte na instrumentační stůl. Na stole rozložte vnější roušku a položte na ni ostatní prvky.

2

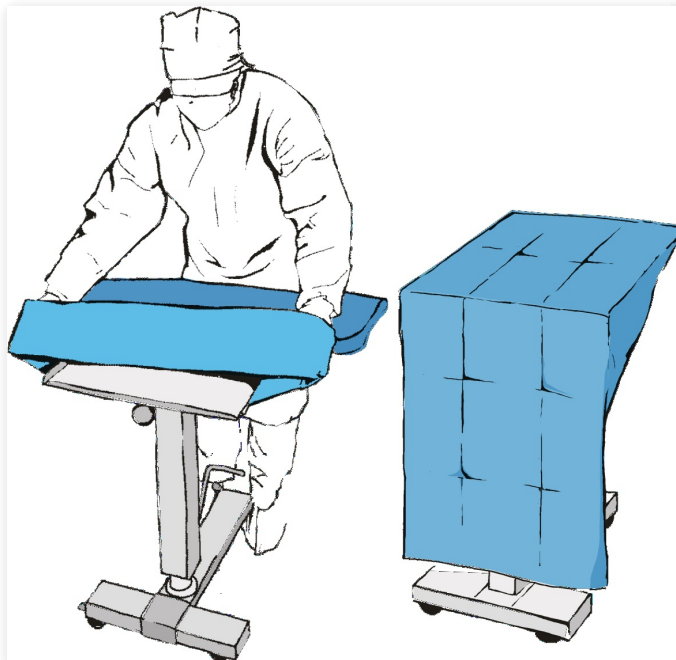

Natáhněte návlek na instrumentační stolek.


3



Zvedněte dolní končetinu, která bude podrobena lékařskému zákroku. Použijte k tomu utěrky Matodrape.


Rozložení setu Matodrape pro operaci kyčlí

4

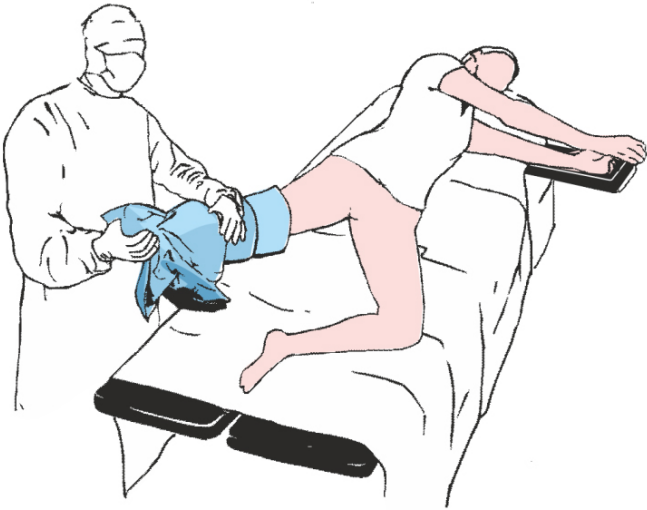


Nasadte návlek na končetinu až pod kyčelní kloub.

5

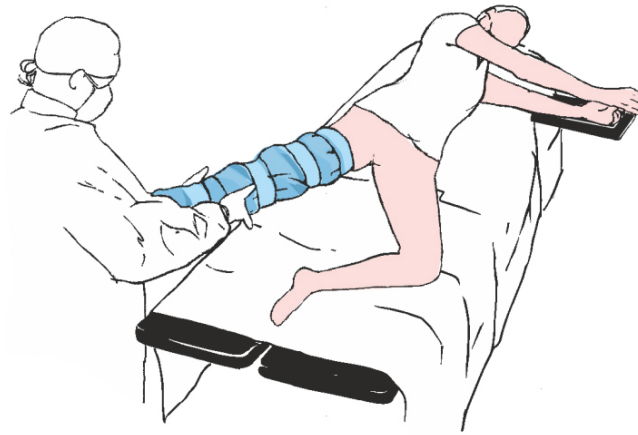

Upevněte jej pomocí lepicích pásků.


6

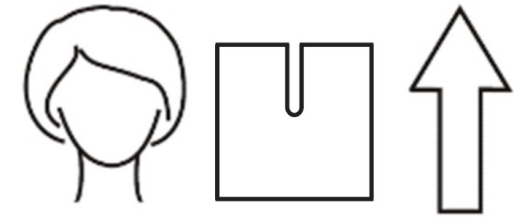

Před zakrytím pacienta (vymezením chirurgického pole) věnujte pozornost piktogramům s vyznačením směru, ve kterém má být rouška rozložena.

Rozložení setu Matodrape pro operaci kyčlí

7

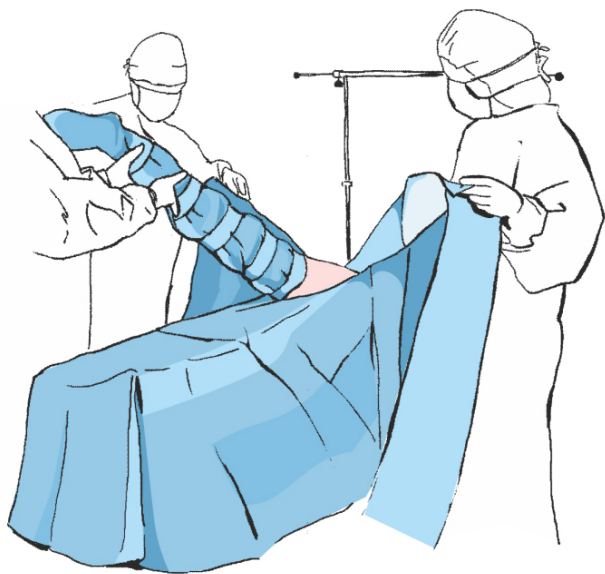


Pod kyčel pacienta položte roušku s výřezem do "U".
Odstraňte ochranný papír z kratší strany lepicí pásky a roušku pevně přilepte do slabin pacienta. Rozložte spodní část roušky směrem ke spodnímu konci operačního stolu a zakryjte tak dolní končetiny pacienta.

8



Odstraňte zbývající ochranné papíry a zakryjte kyčel směrem k pacientově hlavě, čímž určíte boční meze operačního pole. Poté přitlačte místo na roušce, kde je nanášeno lepidlo, k tělu pacienta, aby se zvýšila přilnavost k jeho pokožce.


9

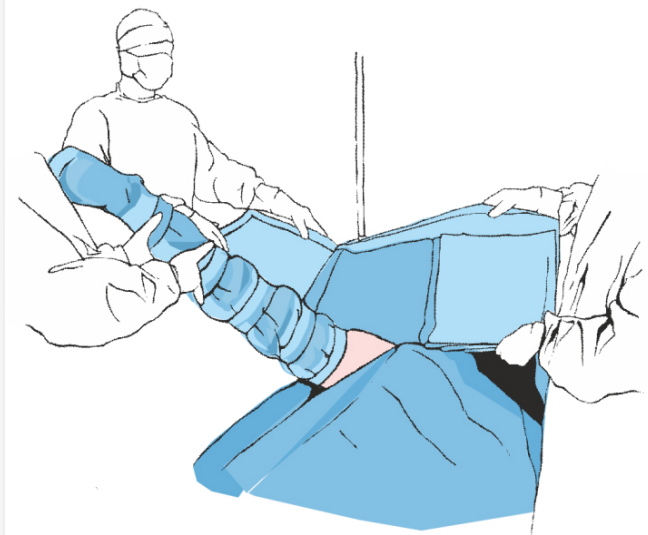

Odstraňte ochranný papír z vrchní roušky. Přilepte roušku tak, aby se netvořily sklady a vymezili jste horní hranici operačního pole.


Rozložení setu Matodrape pro operaci kyčlí

10

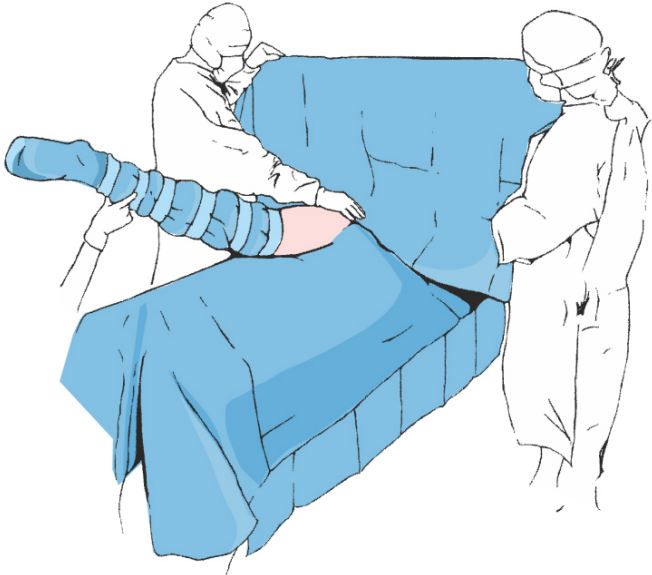

Přitlačením místa na roušce, kde je nanášeno lepidlo, k tělu pacienta, zvýšíte přilnavost k jeho pokožce.

11

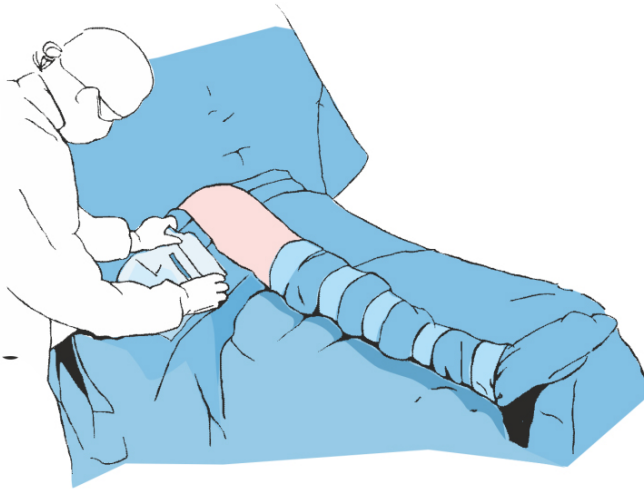

Nakonec na roušku připevněte fóliový sáček, který zachytí tekutiny unikající z rány.

12

