



1

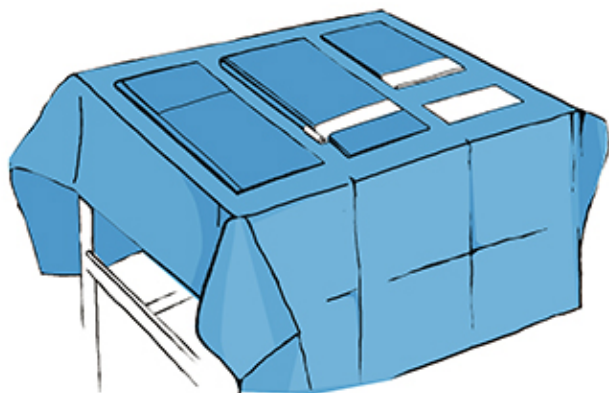

Po otevření obalu položíme roušky na pomocný stolek. Vnější rouškou přikryjeme stolek. Rozložíme obsah balení na stolku, věnujeme pozornost piktogramům na rouškách označujícím místo jejich použití.

2

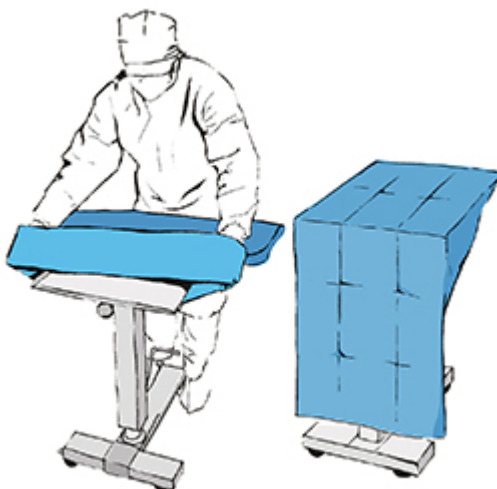

Natáhneme pytlový návlek na instrumentační stolek.


3



Nasadíme návlek na nohu pacienta a upevníme jej pod kolenem samolepícími páskami.

# Rozložení setu pro artroskopii kolenního kloubu Matodrape

4

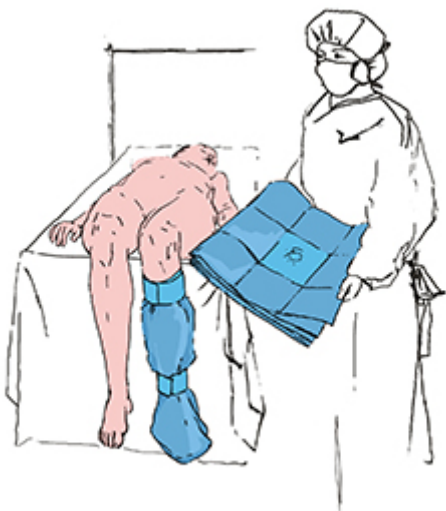


Rozložíme roušku složenou napůl. Rouška je složena takovým způsobem, že je otvor s pružnou manžetou hned viditelný.

5



Rozložíme roušku směrem nahoru po těle pacienta a protáhneme nohu v návleku otvory s pružnou manžetou. Upevníme spodní otvor těsně pod kolenem takovým způsobem, aby se koleno nacházelo mezi otvory.

6

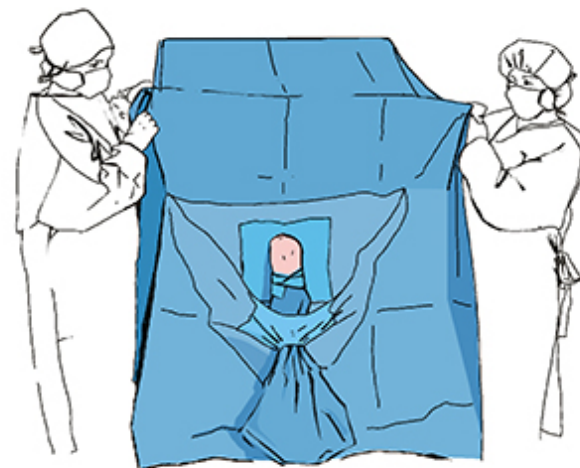

Rozložíme zbývající část roušky a přikryjeme tak celého pacienta. Ze strany hlavy upevníme roušku na anestezjologický monitor pomocí lepících pásek nacházejících se v rozích roušek.