


1



Otevřete vnější obal v souladu se zásadami asepse a soupravu položte na instrumentační stůl. Na stole rozložte vnější roušku a položte na ni ostatní prvky.

2

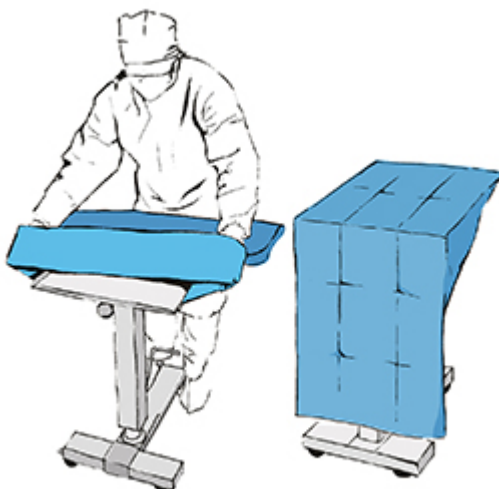


Natáhněte návlek na instrumentační stolek.

3




Před zakrytím pacienta (vymezením chirurgického pole) věnujte pozornost piktogramům s vyznačením směru, ve kterém má být rouška rozložena.

4

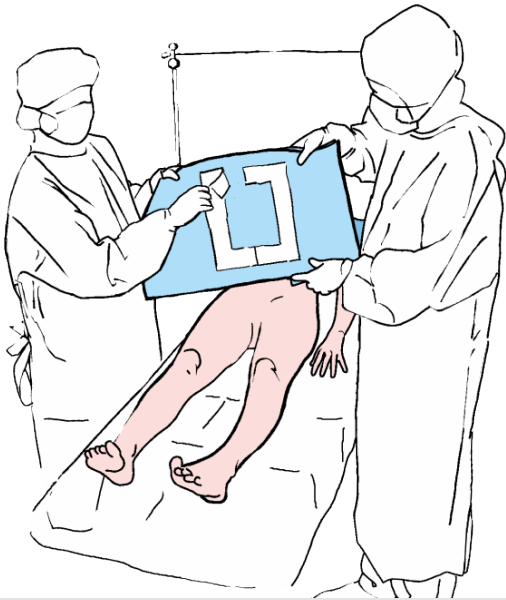


Odstraňte ochranný papír z hlavní roušky. Roušku přilepíme k tělu pacienta tak, aby vymezovala operační pole. Poté přitlačte místo na roušce, kde je nanášeno lepidlo, k tělu pacienta, aby se zvýšila přilnavost k jeho pokožce.

5

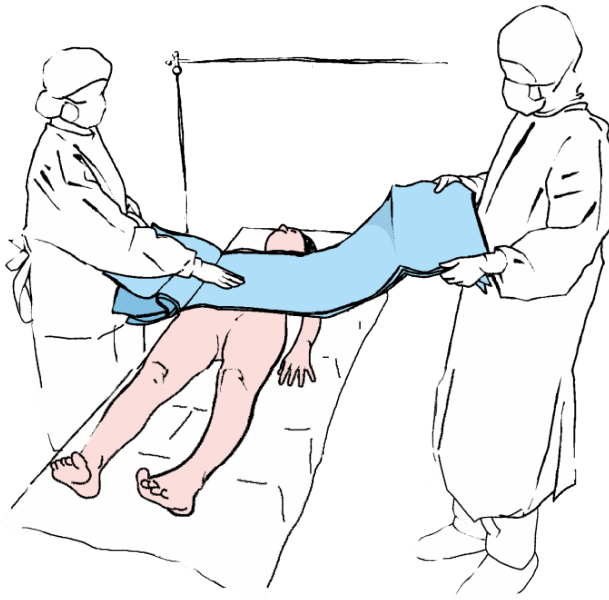


Rozložte strany roušky tak, aby volně visely z operačního stolu.

6

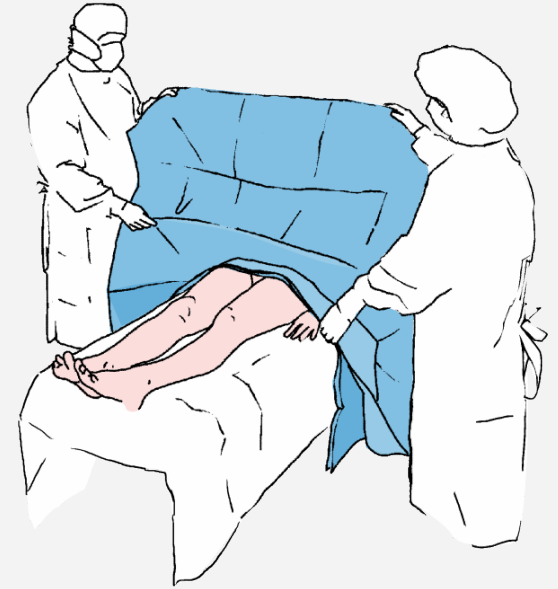

Rozložte horní část roušky směrem k hlavě pacienta (směrem ke stojanu pro anestezii). Roušku umístěte přes rám a vytvořte tak anestetický prostor.

7

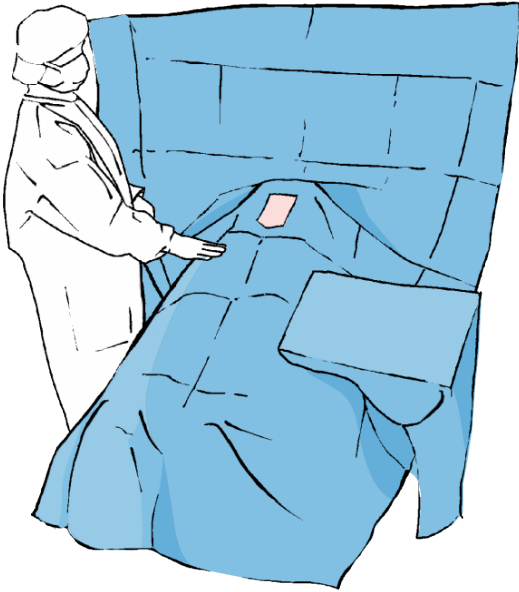

Rozložte spodní část roušky směrem ke spodnímu konci operačního stolu tak, abyste zakryli dolní končetiny pacienta.