



1

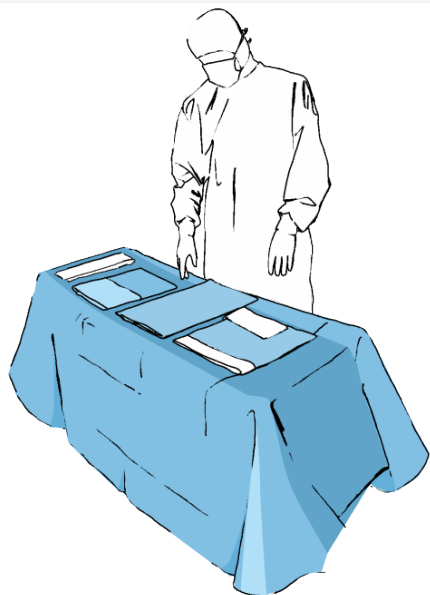

Otevřete vnější obal v souladu se zásadami asepsy a soupravu položte na instrumentační stůl. Na stole rozložte vnější roušku a položte na ni ostatní prvky.

2

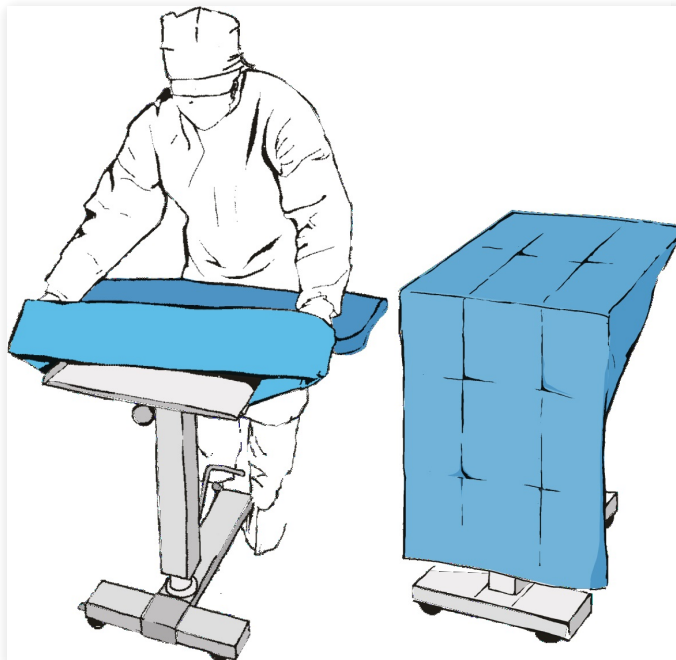

Natáhněte návlek na instrumentační stolek.


3



Odstraňte ochranný papír ze spodní roušky (pouze s lepicí páskou).


# Rozložení setu Matodrape pro strumektomii

4

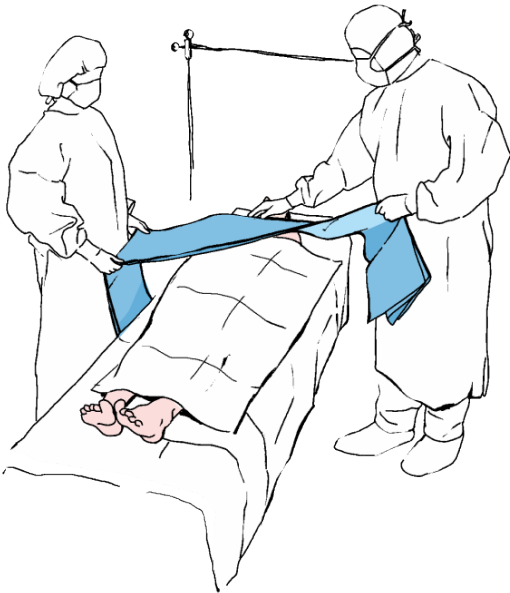


Roušku rozložte na obě strany a přilepte ji k horní části hrudníku pacienta, čímž vymezení spodní okraj operačního pole.

5

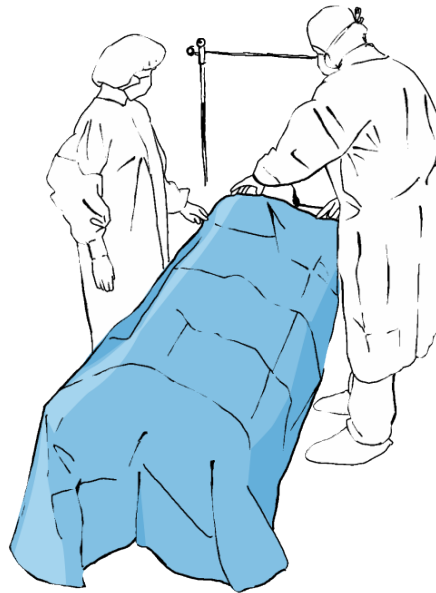

Rozložte spodní část roušky směrem ke spodnímu konci operačního stolu a zakryjte pacientovy dolní končetiny.

6

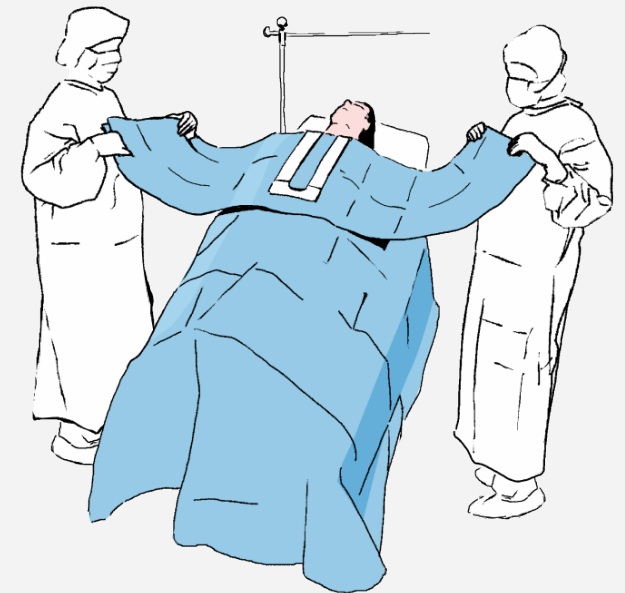


Roušku s otvorem "U" umístěte na spodní roušku tak, aby lepicí pásky byly nahoře.

7




Odstraňte ochranný papír.

8

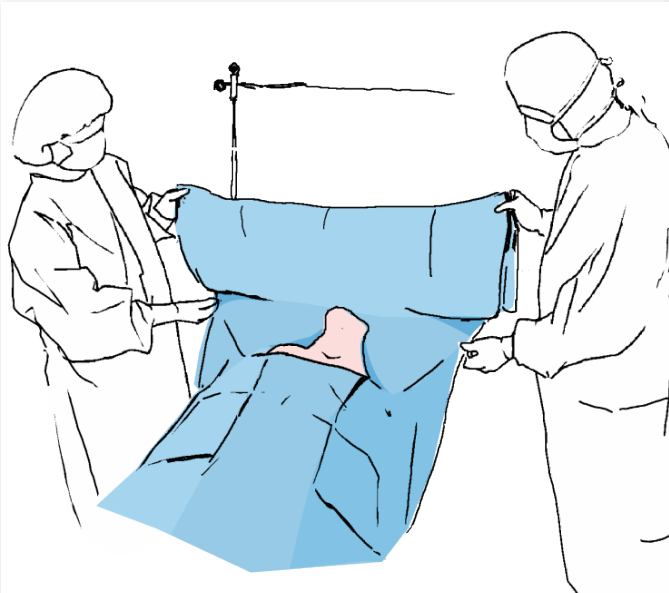

Přilepte roušku tak, aby se netvořily sklady a vymezili jste horní a boční hranice operačního pole. Poté přitlačte místo na roušce, kde je nanášeno lepidlo, k tělu pacienta, aby se zvýšila přilnavost k jeho pokožce. Roušku rozložte ve směru šipek (směrem ke stojanu na anestezii).

9

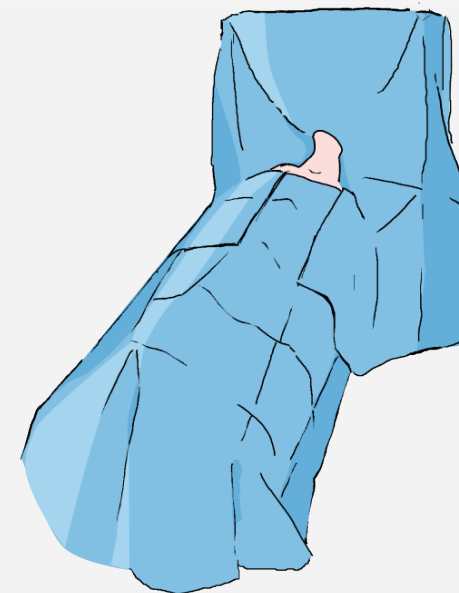

Roušku položte přes rám a přilepte ke stojanům, čímž vymezíte prostor pro anestezii.