



1

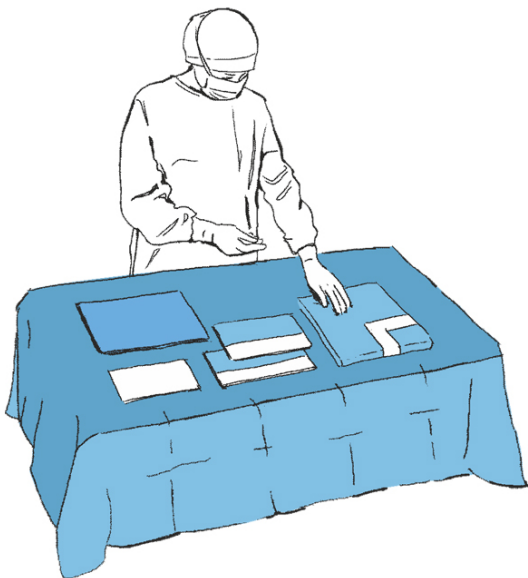

Otevřete vnější obal v souladu se zásadami asepse a soupravu položte na instrumentační stůl. Na stole rozložte vnější roušku a položte na ni ostatní prvky.

2

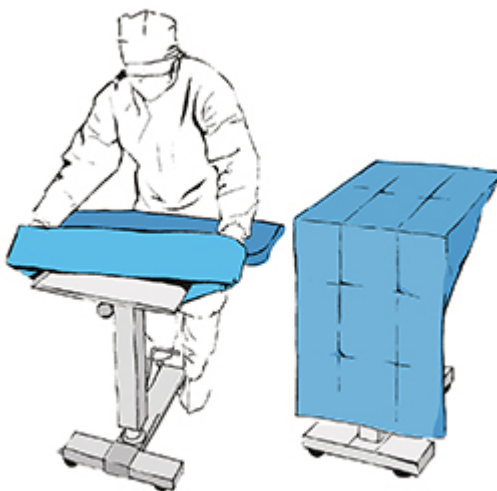


Natáhněte návlek na instrumentační stolek.

3




Před zakrytím pacienta (vymezením chirurgického pole) věnujte pozornost piktogramům a vyznačením směru, ve kterém má být rouška rozložena.

4

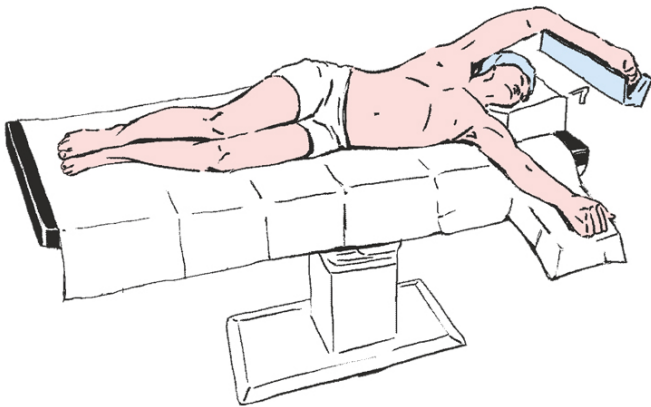


5

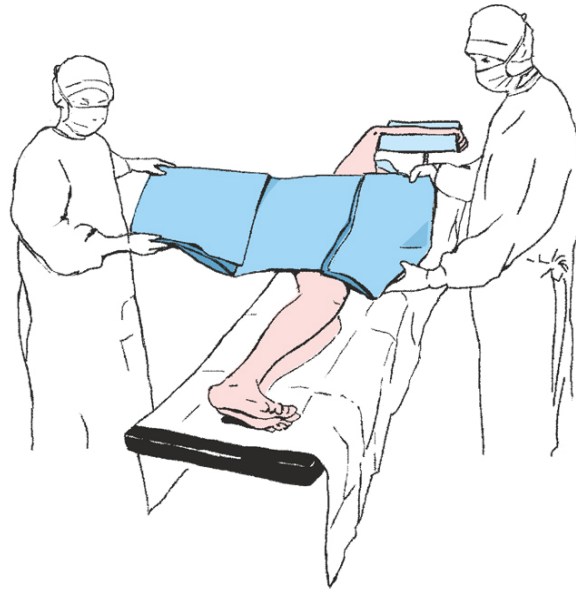


Umístěte roušku s výřezem "U" nad pacientem.

6

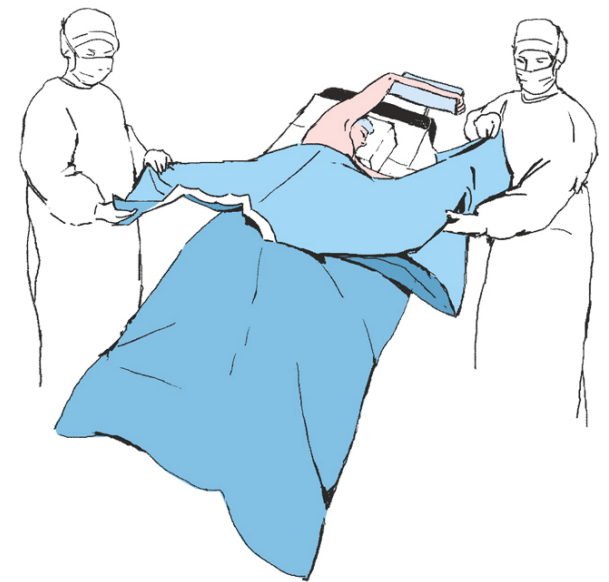

Rozložte spodní část roušky směrem ke spodnímu konci operačního stolu, čímž zakryjete dolní končetiny pacienta.

7

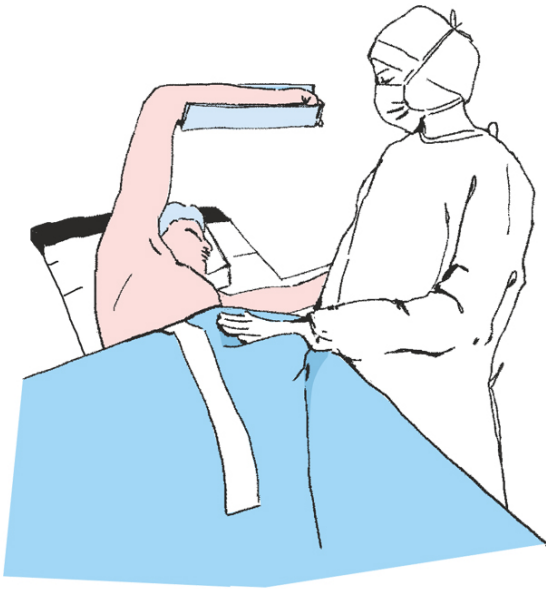

Odstraňte ochranný papír z kratší části lepicí pásky a tu pak přilepte na dolní část hrudníku pacienta.

8



Odstraňte zbývající ochranné papíry z lepicí pásky a opatrně přilepte roušku po stranách hrudníku směrem k hlavě pacienta, čímž vymezíte dolní a boční meze operačního pole. Přitlačte na místa s lepidlem, zvýšíte tím přilnavost k pokožce pacienta.

9



Odstraňte ochranný papír z lepicí pásky horní roušky a přilepte ji k horní části hrudníku. Přitlačte na místa s lepidlem, zvýšíte tím přilnavost k pokožce pacienta. Rozložte roušku ve směru šipek, čímž vytvoříte prostor pro anestezi.

10

