



1

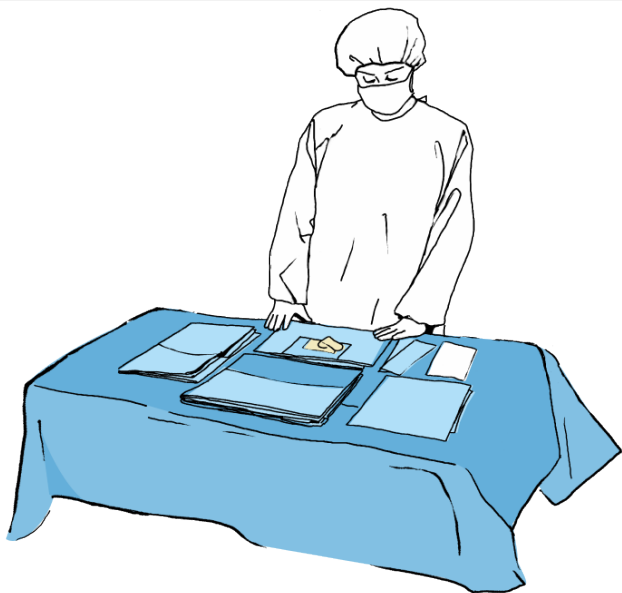


Otevřete vnější obal v souladu se zásadami asepse a soupravu položte na instrumentační stůl. Na stole rozložte vnější roušku a položte na ni ostatní prvky.

2

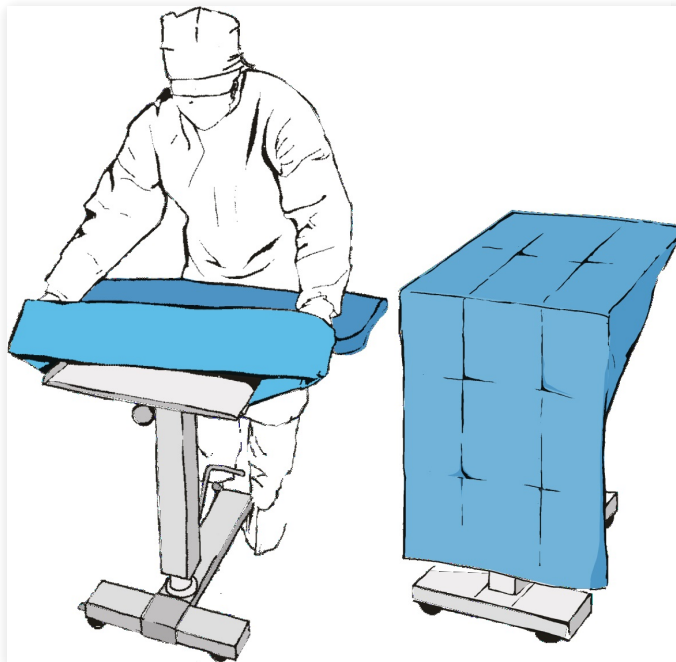

Natáhněte návlek na instrumentační stolek.


3

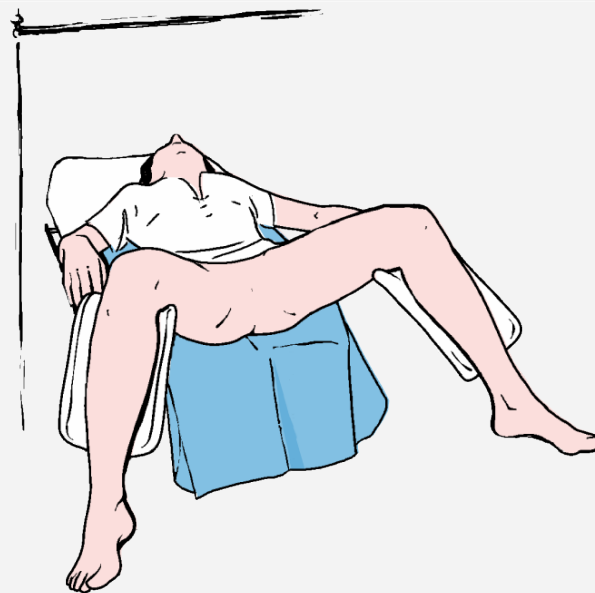

Menší roušku umístěte pod hýždě pacienta, který je v gynekologické poloze.

Rozložení setu Matodrape pro transuretrální resekci

4

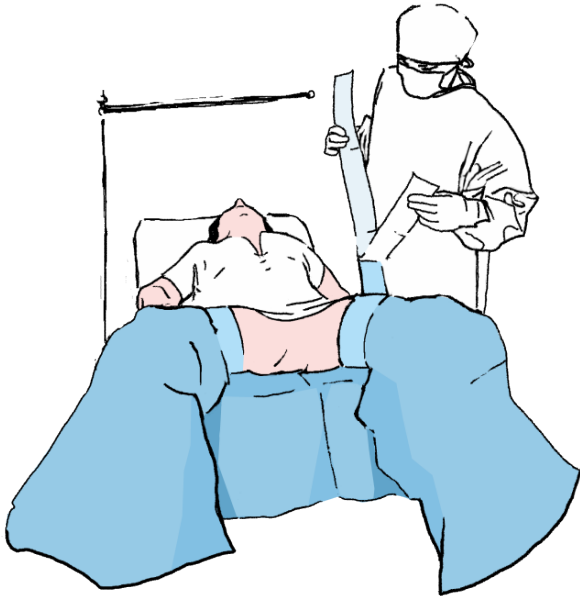


Na končetiny pacienta nasadte návleky a upevněte je lékařskými páskami.

5



Před zakrytím pacienta (vymezením chirurgického pole) věnujte pozornost piktogramům s vyznačením směru, ve kterém má být rouška rozložena.


6

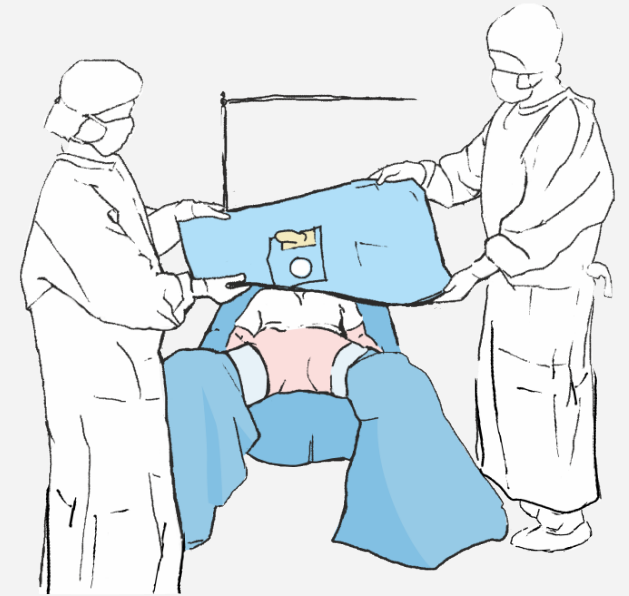

Hlavní roušku částečně rozložte přes pacienta a upravte otvory v příslušných oblastech. Roušku umístěte tak, abyste vymezili operační pole.

Rozložení setu Matodrape pro transuretrální resekci

7

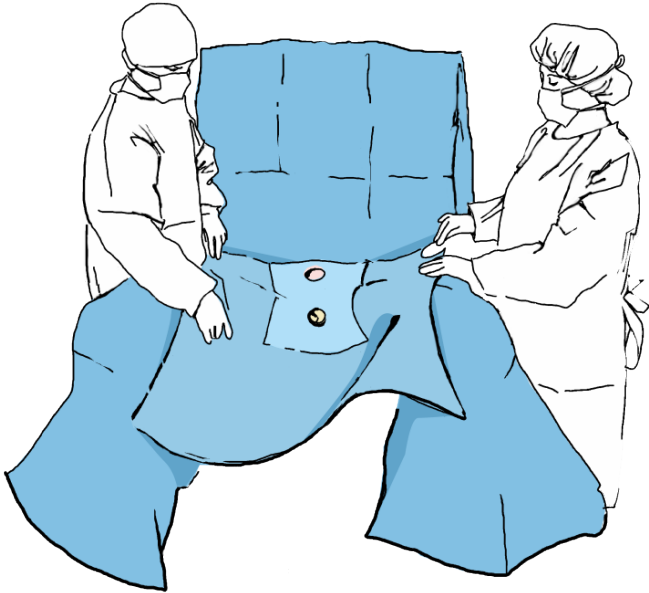

Rozložte strany roušky tak, aby volně visely z operačního stolu. Rozložte horní část roušky směrem k hlavě pacienta (směrem ke stojanu pro anestezii). Roušku umístěte přes rám a vytvořte tak anestetický prostor. Spodní část roušky rozložte směrem ke spodnímu konci operačního stolu, částečně mezi nohama pacienta.

8

