



1

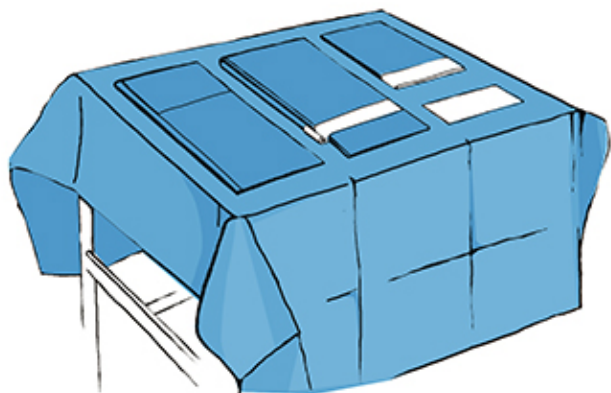

Po otevření obalu položíme rouškování na pomocný stolek. Vnější rouškou přikryjeme stolek a ostatní prvky. Rozložíme obsah balení na stolek, věnujeme pozornost piktogramům na rouškách označujícím místo jejich použití.

2

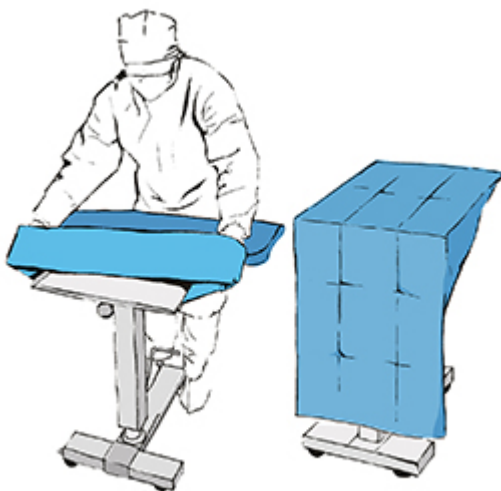


Natáhneme pytlový návlek na instrumentační stolek.

3




Odlepíme ochrannou pásku z roušky označené piktogramem chodidla.

4

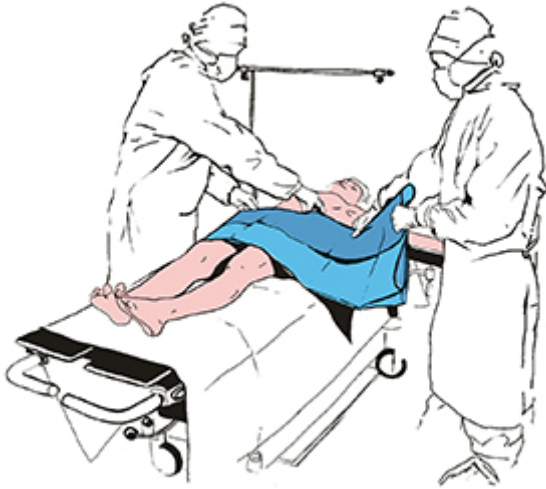


Upevníme roušku na tělo pacienta a roztáhneme ji ve směru šipek, čímž vymezíme spodní hranici operačního pole. Zbývající část roušky roztáhneme na nohy.

5

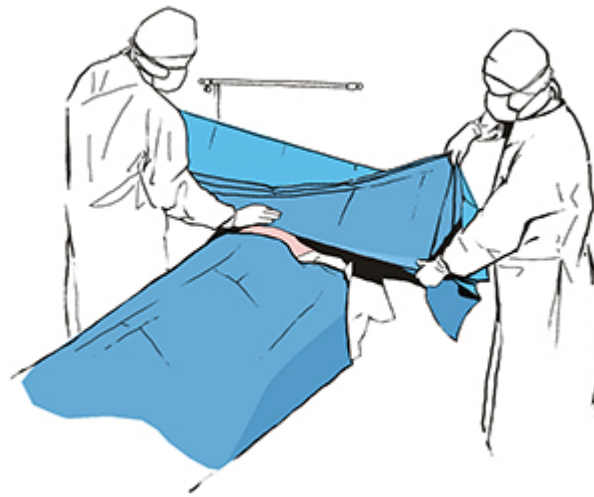

Zajistíme horní hranici operačního pole přilepením roušky ze strany hlavy pacienta (rouška označená piktogramem hlavy). Následně roztáhneme roušku ve směru šipek a upevníme ji k anesteziologickému monitoru pomocí lepících pásek v rozích roušek.

6

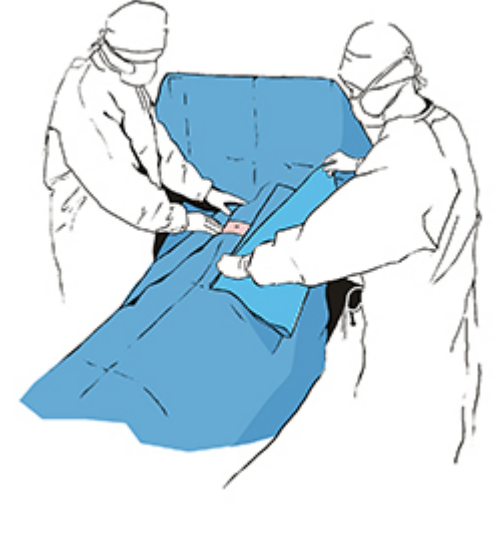

Upevníme boční roušky, čímž vymezíme zbývající hranice operačního pole.